

Состав

Стерильный изотонический раствор, содержащий борную кислоту, ЭДТА (эдетат динатрия), натрия борат и натрия хлорид.

Активные компоненты:

- DYMED (полиаминопропил бигуанид) - 0,0001 %.
- HYDRANATE (гидроксиалкилфосфонат) - 0.03 %.
- Поллоксамин - 1 %.

Описание

«ReNu® MultiPlus» - универсальный раствор, который предназначен для ежедневной очистки, удаления протеиновых отложений, промывки, химической (не термической) дезинфекции и хранения мягких (гидрофильных) контактных линз.

Особенности

- Универсальный раствор обеспечивает постоянное увлажнение поверхности линзы и продолжительный комфорт.
- «ReNu® MultiPlus» очищает, разрыхляет и удаляет образовавшуюся в процессе ношения мягких контактных линз пленку, другие отложения или загрязнения.
- Раствор уничтожает патогенные микроорганизмы, находящиеся на поверхности линзы.
- DYMED (PHMB - полиаминпропил бигуанид) - высокая эффективность дезинфекции в отношении бактерий, грибков и Acanthamoeba, что обеспечивает безопасное ношение.
- Поллоксамин удаляет поверхностные загрязнения и отложения, образующиеся во время ношения, обеспечивая чёткое и стабильное зрение.
- ЭДТА - HYDRANATE расщепляет длинные молекулы белков на более мелкие фрагменты, которые в дальнейшем уже могут быть смыты с поверхности линзы слезой или раствором.

Рекомендации к употреблению

Раствор используется для промывания, хранения и увлажнения линз перед надеванием.

Особенности применения

В этом растворе отсутствуют влагоудерживающие и увлажняющие компоненты. Если вы наблюдаете некоторую сухость, применяя этот раствор, то добавьте в свой набор средств по уходу за контактными линзами специальные увлажняющие капли.

Способ применения

Время дезинфекции - 4 часа.

Раствор применяется для всех видов мягких контактных линз.

Срок годности

Срок использования после открытия - 3 месяца.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 240 мл в флаконе; по 1 флакону в картонной упаковке.

Производитель

BAUSCH LOMB IOM S.P.A, Италия.