

## Описание

o.b.® ProComfort® обеспечивают комфортное введение и надежную защиту благодаря уникальному\*\* шелковистому покрытию SilkTouch™, спиралевидным желобкам FluidLock™ и новой технологии Smooth Technology\* для еще более гладкой поверхности тампона. o.b.® ProComfort® Mini являются наилучшим вариантом для начинающих пользователей, а также в дни со слабыми выделениями.

\* Технология «Смуз Тэкнолоджи» для еще более гладкой поверхности тампона по сравнению с предыдущей версией данного продукта

\*\* По данным исследования «Technical Justification», проведенного ООО «Джонсон&Джонсон» в ноябре 2013 года

## Как использовать

1. Вымой руки. Разорви защитную оболочку, чтобы извлечь безаппликаторный тампон.
2. Потяни внутреннюю трубочку аппликатора из внешней на себя до характерного «клика» (см. схему), чтобы удлинить аппликатор тампона до его полного размера.
3. Большим и средним пальцем возьми аппликатор за внешнюю трубочку и расположи закругленный конец аппликатора у входа во влагалище
4. Осторожно раздвинь половые губы пальцами свободной руки. Вагинальное отверстие расположено между отверстием мочеиспускательного канала и анальным отверстием.
5. Осторожно введи верхнюю часть аппликатора во влагалище под наклоном, пока пальцы не коснутся тела.
6. Указательным пальцем введи внутреннюю трубочку аппликатора во внешнюю. Теперь тампон находится в правильном положении, так, что ты его не ощущаешь
7. Удали аппликаторные трубочки. Нить возврата тампона должна оставаться снаружи. Убедись, что ты удалила обе трубочки аппликатора, затем выкини их (не смывай аппликатор в канализацию, поскольку он пластиковый) и вымой руки.

**Внимание!** Упаковка содержит в себе листовку с важной информацией о редкой и опасной реакции - менструальный СТШ. Пожалуйста, прочтите и сохраните ее (важно для Вашего здоровья и личной гигиены).