

Состав

Натрия карбонат, натрия бикарбонат, натрия перборат, ПВК-30, краситель голубой, лимонная кислота, натрия лаурилсульфоацетат, калия моноперсульфат, тетрацетилэтилендиамин, натрия бензоат, протеолитические ферменты, эфирное масло мяты перечной, полиэтиленгликоль 8000, полиметилсилоксан.

Описание

Средство для ежедневного очищения съемных зубных протезов, которое помогает удалить налет и стойкие пятна и придает свежесть вашим зубным протезам.

Если вы стремитесь к глубокому очищению, но не хотите замачивать протез на ночь, таблетки для очищения зубных протезов КорегаБио Формула – продукт, который вам нужен. Всего за 3 минуты они на 99,9% уменьшают число бактерий, вызывающих неприятный запах изо рта. При использовании в соответствии с инструкцией по применению таблетки для очищения зубных протезов КорегаБио Формула помогают удалить стойкие пятна и уменьшить налет, делая ваш зубной протез более чистым и свежим, чтобы вы смогли стать ближе с самыми важными для вас людьми. В отличие от обычных зубных паст, таблетки Корега не содержат абразивов, поэтому они очищают зубные протезы не царапая их, оставляя меньше возможностей для роста нежелательных бактерий и других микроорганизмов.

Фармакотерапевтическая группа

- на 99,9% уменьшает число бактерий;
- удаляет налет и стойкие пятна;
- придает свежесть вашим зубным протезам;
- не царапает зубной протез при очищении.

Способ применения и дозы

1. Положите таблетку в стакан с теплой (не горячей) водой, чтобы полученный раствор полностью покрывал зубной протез.
2. Замочите зубной протез на 3 минуты.
3. Почистите протез мягкой зубной щеткой с использованием раствора.
4. Тщательно ополосните протез проточной водой.
5. Раствор, оставшийся после использования, следует немедленно вылить.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Упаковка

По 30 таблеток в упаковке.

Производитель

Stafford Miller, Ирландия.