

## **Состав**

Натрия карбонат, натрия бикарбонат, натрия перборат, ПВК-30, краситель голубой, лимонная кислота, натрия лаурилсульфоацетат, калия моноперсульфат, тетрацетилэтилендиамин, натрия бензоат, протеолитические ферменты, эфирное масло мяты перечной, полиэтиленгликоль 8000, полиметилсилоксан.

## **Характеристика**

Таблетки Корега содержат ряд активных компонентов, которые очищают, дезинфицируют зубной протез и оказывают дезодорирующее действие.

Благодаря активному уходу, регулярное применение таблеток Корега помогает продлить срок использования протеза.

Уникальная формула таблеток Корега позволяет удалить остатки пищи в местах, недоступных при механической очистке протеза щеткой.

Постоянное применение таблеток Корега способствует выведению с поверхности протеза таких сложных загрязнений, как налет от кофе и табака.

Благодаря антисептическим компонентам, таблетки Корега дезинфицируют зубной протез, а помещение протеза в раствор на 8 часов является отличным способом стерилизации протеза.

Таким образом, регулярное применение таблеток Корега для очищения зубных протезов позволяет продлить срок службы зубного протеза, сохранить его первоначальный цвет. Кроме того, снизить риск развития воспалений и раздражений десен и слизистой оболочки ротовой полости при использовании зубного протеза.

## **Инструкция**

Перед применением таблеток Корега необходимо тщательно очистить зубной протез от остатков пищи с помощью зубной щетки.

Зубной протез опускают в свежеприготовленный раствор препарата (для приготовления раствора берут 1 стакан теплой воды и одну таблетку Корега).

Рекомендуется оставить протез в растворе на 10-15 минут для очищения, при необходимости стерилизации протеза его оставляют в растворе на всю ночь.

После обработки раствором, протез следует тщательно промыть проточной водой в течение нескольких минут и высушить с помощью бумажной салфетки.

Препарат категорически запрещено использовать для обработки протезов в полости рта.

### **Показания**

Для очищения и дезинфекции съемных зубных протезов

### **Условия хранения**

Хранить в недоступном для детей месте. Хранить при температуре не выше 25°C.

### **Упаковка**

По 30 таблеток в упаковке.

### **Производитель**

Stafford Miller ltd, Ирландия.