

Состав

Paraffinum Liquidum, Calcium/Sodium PVM/MA Copolymer, Petrolatum, Cellulose Gum, Aqua, Silica, Tocopheryl Acetate, Aroma, Aluminum Hydroxide, Cl 14720

Описание

Крем для фиксации зубных протезов Lacalut Fix с мятным вкусом обеспечивает длительную и надежную фиксацию протеза в течение всего дня, предотвращая попадание пищи под протез. Витамин Е ухаживает за деснами, жидкий парафин и вазелин увлажняют слизистые, а соединение алюминия делает десны менее рыхлыми. Подходит для полных и частичных протезов.

Показания

Крем для фиксации зубных протезов.

Способ применения и дозы

Крем наносится точечно или тонкими полосками на чистый протез, но не слишком близко к краю протеза. После нанесения крема протез необходимо крепко прижать к десне на несколько секунд. После установки протеза рекомендуется воздержаться от приема пищи и воды на первые полчаса. После применения плотно закройте крышку тюбика, чтобы крем не засох.

Упаковка

40 г в тубе в картонной коробке.

Производитель

Др. Тайсс Натурварен Гмбх, Германия