

Описание

Фиксирующий крем Protifix (Протефикс) рекомендуется для надежной фиксации при повышенном и нормальном слюноотделении. Он легко наносится, сохраняет свои свойства под воздействием горячей и холодной пищи, лишен вкуса и запаха, не меняет вкус еды и напитков, не оказывает негативного воздействия на желудок.

Не смывается слюной и равномерно распределяется по всей прилегающей к десне поверхности. Фиксирующий крем Protifix (Протефикс) очень экономичен: упаковки хватает приблизительно на 2 месяца.

Особенности

- наносится на влажные зубные протезы;
- сильная и длительная фиксация зубных протезов (не менее 12 часов);
- рекомендуется при повышенном слюноотделении;
- препятствует проникновению пищи под протез;
- не влияет на вкус пищи и напитков;
- удобен и экономичен в употреблении;
- эффективность и безопасность подтверждена клиническими испытаниями;
- немедленно возникает сильная фиксация;
- эффективная герметизация краев помогает избежать проникновения пищи.

Способ применения и дозы

Протезы и полости рта очистить от остатков пищи. На влажные протезы нанести тонкой прерывистой линией фиксирующий крем Protifix (в углубления на зубных протезах верхней и нижней челюсти, которые затем ложатся на десны).

При необходимости можно нанести полоску фиксирующего крема и на заднюю часть десневой пластины протеза верхней челюсти. Затем вставьте протез и на несколько секунд прижмите его к деснам. В течение 5 минут не принимать пищу.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Упаковка

По 40 мл в тубе, по 1 тубе в упаковке.

Производитель

Квайссер Фарма ГмбХ и Кою КГ, Германия.