

Состав

Смесь солей натрия/кальция сополимер метилвинилового эфира и малеинового ангидрида, натрия карбоксиметилцеллюлоза, парафин, вазелин, диоксид кремния, прополиса сухой экстракт, ментол, азорубин, метил-4-гидроксibenзоат. Экстракт прополиса способствует заживлению ран и натертостей в ротовой полости, а также повышает фиксирующие свойства крема, благодаря наличию в составе клейких веществ.

Описание

Протефикс - крем для фиксации зубных протезов немецкой фирмы. Это стоматологическое средство обеспечивает надежный контакт протеза с деснами и создает дополнительный комфорт - освежает дыхание при помощи мятной добавки. Прочное сцепление с деснами предотвращает попадание остатков пищи под протез и защищает от развития патогенной микрофлоры. Этот стоматологический крем долго не теряет своих свойств, устойчив к пище широкого температурного диапазона, не вреден для желудочно-кишечного тракта, устойчив к воздействию слюны.

Противопоказания

- аллергическая реакция на составные мази;
- избыточная чувствительность слизистой рта.

Способ применения и дозы

Перед использованием размять тюбик. Протезы и полость рта очистить от остатков пищи. На влажные протезы нанести тонкой полоской избран фиксирующий крем Протефикс (в углубление на зубных протезах верхней и/или нижней челюсти, которые потом ложатся на десны). При необходимости можно нанести тонкую полоску фиксирующего крема и на заднюю часть пластины протеза верхней челюсти.

Затем вставить протез и на несколько секунд прижать к десне. Сильная фиксация возникает практически сразу и продолжается в течение 8-12 часов. Применять только при здоровой слизистой оболочке полости рта! В течение 5 минут нельзя принимать пищу. Используйте крем Протефикс очень экономно, так как передозировка снижает удерживающие свойства крема.

Важно:

- необходимо давить на тюбик в нижней трети, тогда крем легче дозируется;
- иногда перед применением происходит выделение маслянистой жидкости из тюбика, что никоим образом не влияет на качество и фиксирующей силы крема. Пожалуйста, просто удалите ее с протеза;
- после применения тюбик необходимо плотно закрутить, горловина тюбика должно быть сухая и чистая, попадания влаги ведет к затвердеванию крема;
- остатки фиксирующего крема легко снимаются ватным тампоном с растительным маслом;
- не использовать после истечения срока годности.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С, в сухом и недоступном для детей месте.

Упаковка

По 40 мл в тубе, по 1 тубе в упаковке.

Производитель

Квайссер Фарма ГМБХ и Ко. Кг, Германия.