

## **Состав**

Cellulose gum, Paraffinum Liquidum, Petrolatum, Carbomer, Silica, Cera Alba, Aroma, Limonene.

## **Описание**

Крем для фиксации зубных протезов Корега Комфорт обеспечивает экстра комфорт для десен и защиту от давления, трения и раздражения, которые могут быть вызваны использованием зубных протезов.

Благодаря технологии Adaptagrip, данный крем является не просто фиксатором, но и гидроактивируемым гелем, который содержит карбомер и карбоксиметилцеллюлозу. Созданный специально для того, чтобы начать работать с первых секунд после нанесения, он помогает обеспечить плотное прилегание и создаёт защитный амортизирующий слой между твердыми протезами и мягкой тканью десен на весь день.

## **Свойства**

- смягчает и предотвращает раздражение дёсен;
- легко наносится с помощью узкого носика-аппликатора;
- надёжно фиксирует протез в течение 12 часов.

## **Способ применения и дозы**

Очистите и высушите зубной протез. Нанесите небольшое количество средства крема Корега Защита Десен короткими полосками не слишком близко к краям зубных протезов. Прополощите рот теплой водой перед установкой зубного протеза. Вставьте протез в ротовую полость, плавно прижмите и сомкните челюсти для лучшей фиксации на несколько секунд. Не наносите чаще одного раза в день.

## **Условия хранения**

Хранить при температуре до 25 °С, в недоступном для детей месте.

## **Упаковка**

По 40 г в тубе, по 1 тубе в картонной коробке.

## **Производитель**

эгол Гузундхейтспфлег-унд Фармапродукт Гмбх, Германия.