

## **Состав**

Paraffinum Liquidum, Calcium/Sodium PVM/MA Copolymer, Petrolatum, Cellulose Gum, Aqua, Silica, Tocopheryl Acetate, Aluminum Hydroxide, Cl 14720

## **Описание**

Крем для фиксации зубных протезов Lacalut Fix с нейтральным вкусом обеспечивает длительную и надежную фиксацию протеза в течение всего дня, предотвращая попадание пищи под протез. Витамин Е ухаживает за деснами, жидкий парафин и вазелин увлажняют слизистые, а соединение алюминия делает десны менее рыхлыми. Крем не изменяет вкус пищи. Подходит для полных и частичных протезов.

## **Показания**

Крем для фиксации зубных протезов.

## **Способ применения и дозы**

Крем наносится точечно или тонкими полосками на чистый протез, но не слишком близко к краю протеза. После нанесения крема протез необходимо крепко прижать к десне на несколько секунд. После установки протеза рекомендуется воздержаться от приема пищи и воды на первые полчаса. После применения плотно закройте крышку тюбика, чтобы крем не засох.

## **Упаковка**

40 г в тубе в картонной коробке

## **Производитель**

Др. Тайсс Натурварен Гмбх, Германия