

Состав

Поперечно сшитый полимер натриевой соли гиалуроновой кислоты 0,15%, карбоксиметил β -глюкан 0,3%, буферный изотонический раствор pH 7,2.

Без консервантов.

Перед использованием медицинского изделия, пожалуйста, ознакомьтесь с данной инструкцией.

Описание

Умастар, капли глазные - это заменитель слез, не содержит консервантов.

Содержит поперечно сшитую натриевую соль гиалуроновой кислоты с карбоксиметил β -глюканом.

Поперечно сшитая натриевая соль гиалуроновой кислоты благодаря своей сетевидной структуре, обеспечивает лучшую гидратацию и вязкость, эластичность та высокую стабильность слезной пленки, остается в течение длительного времени на поверхности глаза.

Карбоксиметил β -глюкан дополнительно усиливает увлажняющие свойства этого медицинского изделия, позволяет противодействовать оксидативного стресса, вызванном свободными радикалами и поддерживает реорганизацию клеток роговицы.

Технология OSD (офтальмологический дозатор нажимного типа) обеспечивает инновационную доставку абсолютно стерильных глазных капель без консервантов.

Показания

Используются для защиты, гидратации и смазки поверхности глаза.

Умастар, капли глазные, способствуют устранению симптомов сухости, ощущение инородного тела и т.п. при:

- синдроме сухого глаза;
- *механическом стрессе*: использование контактных линз, хирургические процедуры и т.д.;
- *системных заболеваниях*: синдром Шегрена, ревматоидный артрит, заболевания печени и др;

- *гормональных нарушениях*: менопауза, гормональная терапия и т.д.;
- *экологическом стрессе*: кондиционирование воздуха, сигаретный дым, ветер и т.д.;
- *устомляемости глаз*: перегрузки органа зрения при просмотре видеоматериалов;
- *применении определенных препаратов*: антидепрессантов, бета-блокаторов, простагландинов и др.

Медицинский изделие совместимо с контактными линзами.

Противопоказания

- В случае возникновения побочных реакций прекратите прием и обратитесь к врачу.
- Перед использованием медицинского изделия необходимо убедиться, что контейнер не поврежден.
- Не используйте изделие после окончания срока годности, указанного на упаковке.
- Срок годности указан по запечатанного продукта при условии надлежащего хранения.

Способ применения и дозы

- Не нужно снимать контактные линзы перед использованием капель глазных Умастар.
- Вымыть руки перед применением продукта.
- Закапывать по 1-2 капли в каждый глаз 2-3 раза в день или по рекомендации врача.
- Убедиться, что капельница не контактирует с глазом.

Условия хранения

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Не применять более 90 дней с момента открытия контейнера.
- После использования плотно закрывать контейнер. Хранить при температуре не выше 30 ° C, вдали от источников тепла.

Упаковка

Контейнер 10 мл с дозатором OSD.

Производитель

Italdevice srl.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Виа Лаурентина, км 26,700. Помеция, Рим, Италия.