

Состав

Эфирное масло чайного дерева (Melaleuca Alternifolia), эфирное масло ромашки (Anthemis Nobilis), Д-пантенол, алоэ вера, таурин, ромашка ароматная, трис (гидроксиметил) аминометан, борная кислота, динатрий ЭДТА, гидроксиметилглицинат натрия, кокаmidопропилбетаин, PEG-40, гидрогенизированное касторовое масло, ППГ-26-бутет-26, тридецил-9 и очищенная вода.

Лекарственная форма

НАВИБЛЕФ™ ТТО ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД пенка для воспаленных век - помогает устранить выделение и посторонние вещества с век и ресниц, которые возникают из-за бактерий и демодекса.

НАВИБЛЕФ™ ТТО Интенсивный уход - это нежирное средство, которое не вызывает раздражения, для местного применения. Только для наружного применения.

НАВИБЛЕФ™ ТТО ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД содержит высокую концентрацию масла чайного дерева, которая, благодаря своей маслянистой консистенции, помогает устранить выделения, которые трудно устранять, с век и ресниц.

НАВИБЛЕФ™ ТТО ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД содержит алоэ вера, что помогает поддерживать кожу увлажненной.

ЧТО ТАКОЕ БЛЕФАРИТ?

Это хроническое воспаление век, который является одним из самых распространенных заболеваний глаз, часто возникает из-за наличия демодекса и бактериальных поражений. Это заболевание часто становится причиной дискомфорта в глазах, покраснение и слезотечение.

К другим симптомам блефарита относятся жжение, зуд, чувствительность к свету и раздражение, ощущение песка в глазах, которые усиливаются при пробуждении.

Блефарит - это хроническое заболевание, требующее длительного лечения, соблюдения гигиены и поддерживающей терапии для контроля над болезнью и избежания дальнейших, связанных с этим заболеванием, осложнений.

Показания

НАВИБЛЕФ[™] ТТО ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД предназначен для лечения воспаленных век и ресниц после механического устранения сильных глазных выделений.

Выделение, вызванные воспалительными процессами, такими как сухость, ношение контактных линз, аллергические реакции, воспаление век и блефароконъюнктивит, вызванный наличием демодекса (глазных клещей) или бактериальными поражениями.

Эту пенку можно использовать для очистки основания ресниц и края век до и после операции.

Особенности применения

Всегда мойте руки до и после применения.

Снимите контактные линзы перед применением пенки. Убедитесь, что вы убрали всю пенку и ее остатки перед повторным установлением линз.

Держите глаза закрытыми и дайте пенке высохнуть перед тем, как открыть глаза.

Средство предназначено для применения на веках и ресницах. Не применять прямо на глазах.

Только для наружного применения.

Используйте гипоаллергенную косметику и лосьоны для чувствительной кожи вокруг глаз при применении средства.

Не используйте средство при наличии подтвержденной гиперчувствительности к любому из составляющих продукта.

При возникновении реакции на средство, немедленно прекратите его применение, промойте глаза водой и свяжитесь с окулистом, если симптомы не исчезают.

Не используйте средство через 3 месяца после открытия.

Не используйте, если флакон поврежден.

Не используйте по истечении срока годности.

Применение в период беременности или кормления грудью

Во время беременности и лактации необходимо проконсультироваться с врачом перед началом использования.

Способ применения

1. Перед применением пенки, вымойте руки, а затем очистите кончики пальцев с помощью НАВИБЛЕФ™ ТТО ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД.
2. Нажмите на дозатор и выдавите пенку на очищенные кончики пальцев. При использовании до или после операции, или в случае чувствительной слизистой оболочки и кожи вокруг глаз, рекомендуется разместить пенку на стерильной марлевой салфетке.
3. Закройте глаза и разотрите НАВИБЛЕФ™ ТТО ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД по векам и ресницам. Не прикасайтесь и не открывайте глаза при применении. Во избежание попадания средства в глаза, дайте пенке высохнуть перед тем, как открыть глаза. Оставьте средство минимум на 3 - 5 минут.
4. После каждого применения, промойте ресницы и веки теплой водой.

Примечания: Повторите эти действия для другого глаза. Проводите такую обработку 2 - 3 раза в день в течение 7 - 14 дней для достижения большего эффекта.

Дети

Не используйте средство для детей до 6 лет. Детям старше 6 лет обработку должен проводить взрослый и только по рекомендации вашего врача.

Условия хранения

Хранить при температуре от 5 до 35°C и защищать от прямого источника света. Храните в недоступном для детей месте.

Производитель

NOVAX PHARMA, Монако.