

Состав

Диоктил сульфосукцинат натрия, экстракт алоэ, гиалуронат натрия, глицерин.

Фармакодинамика

Иариклан спрей - мягкое средство, предназначенное для гигиены ушей. Применяется для удаления остатков ушной серы и серных пробок и предотвращения их образованию.

Медицинское изделие содержит:

- диоктил сульфосукцинат натрия, эффективно удаляет ушную серу, особенно у детей;
- экстракт алоэ вера, природный ингредиент, известный своими увлажняющими свойствами;
- гиалуронат натрия, ответственный за поддержание надлежащей гидратации слизистых оболочек уха.

Продукт не содержит консервантов, парабенов и пропелентов.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к ингредиентам продукта.

Особенности применения

Не вводите ушной аппликатор слишком глубоко в ушной канал, чтобы избежать раздражения или повреждения.

Не используйте Иариклин спрей в случае перфорации барабанной перепонки, ушных инфекций или при применении дренажа уха.

Не используйте продукт при боли в ухе без консультации с врачом.

Медицинское изделие для ушей. Избегайте контакта с глазами.

Не глотайте.

Способ применения и дозы

Иариклин Спрей следует применять в соответствии с инструкциями по применению.

В случае возникновения любой вопросов, проконсультируйтесь со своим врачом или другим квалифицированным медицинским работником.

Продукт предназначен для детей старше 1 года и взрослых.

Дозировка:

Регулярная гигиена ушей: пользуйтесь 1-2 раза в неделю.

Удаление ушной серы и серной пробки: использовать ежедневно в течение 3-4 дней.

Способ применения:

Перед использованием встряхните флакон, введите аппликатор во внешней ушной канал и нажмите несколько раз, пока не появится жидкость. Введите необходимую дозу. Подождите примерно одну минуту и введите физиологический раствор соли в ушной канал, чтобы промыть ухо. Повторите это действие со вторым ухом. Форма спрея обеспечивает равномерное распыление и точное дозирование.

После использования промойте аппликатор под проточной водой.

Из соображений гигиены и избежания возможного переноса инфекции рекомендуется использовать один флакон для одного человека.

Для безопасности не следует использовать аппликатор не по назначению.

Не использовать неисправный аппликатор.

Не используйте по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Храните в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° C.

Храните в недоступном для детей месте.

Не используйте после окончания срока годности, указанного на упаковке и этикетке.

Производитель

Гофарм Сп.з.о.о.Сп.к.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Улица Гурникув, 21/26, Краков 30-819, Польша.