

Описание

Аспиратор Отривин Бэби – специальное устройство, применяемое при ринитах у новорожденных, грудных и детей младшего возраста для удаления слизистых выделений из носа, а также для ежедневной гигиены полости носа.

Для большей эффективности перед удалением слизи рекомендуется провести промывание носовой полости соленым раствором или морской водой, например капли для орошения полости носа Отривин Бэби.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с педиатром.

Способ применения

Присоедините сменную насадку к корпусу аспиратора.

Вставьте наконечник в один из носовых ходов ребенка.

Осторожно втягивайте воздух ртом при помощи равномерных вдохов через мундштук.

Повторите процедуру для другого носового прохода

Во избежание повторного инфицирования использованную насадку следует выбросить.

В комплекте три сменные насадки.

Сменные насадки также продаются отдельно по 10 штук в упаковке.