

## **Описание**

Эксклюзивные тест-полоски Contour Plus запатентованные известной швейцарской компанией. Их химический состав обеспечивает высокую точность измерений. На показатель уровня глюкозы не влияет кислород, мальтоза и галактоза в крови. Изделия прошли сертификацию в Украине, качество соответствует европейским стандартам. Не требуют ручного кодирования!

Тест показывает результат с минимальной погрешностью даже при очень низкой концентрации сахара в крови. Точность результатов превышает мировой стандарт ISO.

Полоски подходят для использования с глюкометрами Contour Plus и Contour Plus ONE. Чтобы анализ проходил корректно, изделия нужно использовать только с приборами оригинальной торговой марки.

## **Способ применения**

1. Промойте руки с мылом или протрите их спиртовой салфеткой.
2. Достаньте тест-полоску из коробки и вставьте в специальный разъем глюкометра (прикасаться к полоске можно с любого края).
3. Поместите ланцет в устройство для прокалывания (вы должны услышать щелчок).
4. Снимите колпачок с ланцета, накройте иглу наконечником.
5. Приложите край ланцета к пальцу и нажмите на кнопку, делая прокол (рекомендуем сбоку подушечки пальца, где наименее чувствительная кожа).
6. Массируйте палец от основания к краю, пока не получится капля крови.
7. Краем тест-полоски нажмите капли.
8. Через несколько секунд вы увидите результат теста на экране.
9. Протрите палец спиртовой салфеткой.
10. Достаньте тест-полоску из глюкометра и выбросите в мусорный бак.

## **Условия хранения**

- Хранить изделия допускается только в оригинальном флаконе;
- не использовать тест-полоски, чей срок годности превышен;
- хранить и перевозить при температуре от 0 °С до 30 °С;
- каждая полоска является одноразовой, после одного применения становится непригодной;
- держать в недоступном для детей месте.

**Упаковка**

По 25 тест-полосок в упаковке.

**Производитель**

Байер Консьюмер Кер АГ, Швейцария.