

## **Описание**

Очки для фототерапии Билирубишка применяются при процедуре фототерапии новорожденных для защиты глаз от ультрафиолетовых лучей.

Защитные подушки защищают от прохождения лучей на 100%.

Очки применяются для детей с рождения, в том числе преждевременно рожденных.

Они изготовлены из эластичного материала и имеют Y-подобную форму, благодаря чему хорошо фиксируются.

## **Преимущества**

- На 100% защищают глаза от УФ лучей.
- Изготовлены из эластичного материала.
- Комфортны для ребенка.
- Хорошо фиксируются благодаря Y-подобной форме.
- Очки стерильные.

## **Способ применения**

1. Достаньте очки для фототерапии Билирубишка из стерильным упаковки.
2. Очки должны быть расположены защитной подушкой к глазам ребенка.
3. Расположите очки так, чтобы они равномерно и полностью покрывали глаза ребенка.
4. Отрегулируйте очки с помощью эластичного повязки с липучками.
5. Убедись, что размер очков подобрано оптимально.
6. Очки предназначены для одноразового индивидуального использование.

## **Производитель**

MEDBAR TIBBI MALZEMELER, Турция.