

## **Состав**

*активные вещества:* вода, карбомер, полоксамер 188, натрия гидроксид.

Не содержит консервантов.

## **Свойства**

Оригинальная формула Теагеля:

- способствует удержанию геля на веках;
- содержит ингредиент полоксамер, который, образуя эмульсию, обеспечивает растворение и мягкое удаление слизи и загрязнений с век и корней ресниц;
- сохраняет естественную гидратацию век;
- освежает, смягчает и успокаивает кожу век;
- не оставляет следов, не является жирным или липким.

## **Рекомендации к применению**

Теагель - гипоаллергенный, стерильный гель для ежедневной гигиены век и ресниц. Гигиена век рекомендуется офтальмологами и оптометристом в следующих случаях:

- блефарит (воспаление век): передний краевой и задний краевой;
- синдром сухого глаза, связанный с дисфункцией мейбомиевых желез (нарушение функции желез, расположенных внутри век);
- поражения глаз и век, связанные с акне и розацеа (заболевание кожи лица, вызывает покраснение);
- поражения глаз и век, связанные с себорейным дерматитом (заболевание кожи лица, вызывают покраснение и отрубевидный лишай).

Гигиену век также рекомендуют проводить перед хирургическим вмешательством, если требуется полное и тщательное очищение корней ресниц.

Теагель может быть рекомендован лицам, которые носят контактные линзы.

Теагель - стерильный гель, разработанный для мягкой механической очистки раздраженных или поврежденных век или чувствительной или склонной к аллергическим реакциям кожи век.

## **Особенности применения**

Использовать для век и ресниц. Не следует наносить непосредственно на глаза. Не разрезать тубу (есть риск бактериального загрязнения геля).

Протестирован под контролем офтальмологов. Не содержит консервантов, парабенов, спирта и ароматизаторов. Гель находится в тубе, применена технология Steri-Free, позволяет производство стерильного геля без консервантов и агрессивных компонентов, инновационной упаковке - тубе Polydose™ Airless (многодозовая туба с безвоздушным дозатором), что сохраняет гель стерильным без консервантов в течение всего времени его использования, но не более 8 недель.

### **Способ применения и дозы**

Используйте Теагель дважды в сутки, утром и вечером, или столько раз, сколько необходимо для очистки века.

1. Перед первым использованием выполните следующие действия: слегка нажмите на переднюю часть тубы (на логотип Thea) в течение 3 с, чтобы подтолкнуть гель по направлению к дозатора.
2. Затем расположите тубу дозатором вниз и заполните дозатор, трижды нажав на него
3. Нажмите на дозатор, чтобы выпустить на салфетку небольшое количество Теагеля (не нажимая на тубу). Удалите салфеткой гель, оставшийся на горловине тубы.
4. Закройте один глаз и с помощью зеркала мягко нанесите гель на закрытое веко и корни ресниц.
5. Осторожными круговыми движениями протрите веки и корни ресниц до удаления всех загрязнений.
6. Удалите остатки Теагеля с век чистой салфеткой (тампоном).
7. Повторите предыдущие 4 шага для второго глаза.

Не требует смывания после использования.

### **Условия хранения**

Хранить при температуре 25 ° С. После вскрытия тубы использовать не более 8 недель.

### **Упаковка**

Туба 30 г в картонной коробке.

### **Производитель**

Laboratoires Thea, Франция.