

## **Описание**

Универсальные наборы пластырей с подушечкой на тканевой, полимерной, полиуретановой, нетканой основах широкого спектра использования. Форма выпуска стрип. Также может выпускаться в рулонах на полимерной или тканевой основах разного размера (Экономичный).

## **Показания**

Предназначен для фиксации поврежденных пальцев, при оказании первой помощи в случае мелких ран, царапин, порезов.

## **Способ применения**

Перед использованием вынуть пластырь из бумажного пакета и снять защитную пленку, после чего подушечкой приложить к ране, а края пластыря прижать к коже. Пластырь может оставаться на коже в течение суток.

## **Противопоказания**

Гиперчувствительность к основе пластыря, клеящего вещества

## **Побочные эффекты**

Раздражение кожи в месте приклеивания.

## **Предостережение**

Пластырь нельзя использовать на открытых и послеоперационных ранах, на раздраженной коже. В случае появления сильного раздражения пластырь необходимо снять.

## **Условия хранения**

Хранить при температуре от 5°C до 35°C.

## **Производитель**

ООО "КАЛИНА МЕДИЦИНСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ", 04128, г. Киев, ул. Садовая, 16/19, Украина

Юридический адрес: 04070, г. Киев, ул. Боричев ток, д. 35А, Украина