

Состав

активные вещества: комплекс четвертичных аммониевых соединений - не менее 9,0;

вспомогательные синергические компоненты (в т.ч. ПАВ, краситель, ароматизатор) - до 100,0.

Описание

Данное средство предназначено для дезинфекции, достерилизационной очистки и санитарной обработки широкого спектра объектов.

Особенности применения

- Сочетает антимикробное, моющее и дезодорирующее действия, не фиксирует загрязнения, не повреждает объекты обработки.
- Эффективно в отношении наиболее устойчивых инфекционных возбудителей, в том числе полиовирусов, бактериальных спор, возбудителей туберкулеза и дерматомикозов.
- Безопасно для объектов обработки и людей, разрешено к применению в присутствии пациентов.
- Имеет режимы достерилизационной очистки изделий медицинского назначения, соединенных с их дезинфекцией, а также дезинфекции высокого уровня эндоскопов и медицинских инструментов к ним.
- Может использоваться в ультразвуковом и циркуляционном моечном оборудовании.
- Обладает остаточным (продолжительным) антимикробным действием.

Спектр антимикробного действия

Средство обладает бактерицидным (в т.ч. возбудители туберкулеза), вирулицидным (в т.ч. полиовирусы, возбудители гепатитов В и С, СПИД), фунгицидным (в т.ч. возбудители кандидоза, дерматомикозов, плесневые грибы) и спорицидным действием.

Противопоказания

Индивидуальная чувствительность к компонентам средства.

Способ применения

Дезинфекцию изделий медицинского назначения осуществляет медицинский персонал. Дезинфекция и мытье поверхностей: 0,6% - 60 мин; 0,8% - 30 мин. (Бактериальные и вирусные респираторные инфекции, профилактическая дезинфекция) 2,3% - 60 мин. - вирусы гепатита А, полиовирусы; 2,3% - 120 мин. - туберкулез.

Срок годности

5 лет в закрытой упаковке производителя.

Условия хранения

Хранить в сухом, недоступном для детей месте.

Упаковка

По 23 мл в саше.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ООО "Укр. Научно-производственный центр проблем дезинфекции".