

## **Описание**

Тест для определения беременности полоска ТЕТА (10 мМЕ/мл) ULTRA №1 - это выполняемый самостоятельно одношаговый иммунохроматографический анализ, разработанный для количественного определения человеческого хорионического гонадотропина (ХГЧ) в моче с целью обнаружения беременности в сроки 7-11 дней после зачатия.

## **Способ применения**

Определение даты тестирования:

- Тест может быть использован на 7-11 день после предполагаемой даты зачатия или с первого дня задержки менструации. В большинстве случаев в этот день тест дает правильный результат.
- В случае получения отрицательного результата тогда, когда ожидается беременность, рекомендуется повторить тест через несколько дней, так как концентрация ХГЧ может отличаться у разных женщин, или дата последней менструации может быть определена ошибочно.

Процедура проведения теста:

- Погрузить полоску в мочу, направив стрелку на тест-полоске вниз. Не погружать ниже отметки. Через 5 секунд вынуть тест-полоску и положить ее на плоскую, чистую, сухую, не поглощающую влагу поверхность.
- Подождать до появления цветных линий. В зависимости от концентрации ХГЧ в моче положительный результат может быть виден уже через 40 секунд. Однако для подтверждения отрицательного результата для завершения всех реакций необходимо 5 минут. Поэтому окончательный результат можно считать действительным через 5 минут.
- Результат, полученный после 30 минут, следует считать недействительным.

Интерпретация результатов:

- Положительный результат. Видны две цветные линии - одна в контрольной (С), а другая - в тестовой области (Т). Это свидетельствует о наступлении беременности. Интенсивность окраски тестовой линии может меняться в разные периоды беременности.
- Отрицательный результат. В контрольной области (С) появилась одна цветная линия и нет цветной линии в тестовой области (Т). Это указывает на отсутствие (не наступление беременности).
- Недействительный результат. Отсутствуют видимые линии вообще, или в тестовой области видна только одна линия. В этом случае для подтверждения или опровержения полученного результата процедуру следует повторить с другой тест-полоской.

## **Особенности применения**

- Алкоголь может влиять на результаты тестирования, поэтому не рекомендуется проводить тестирование после приема спиртного.
- На самых ранних стадиях беременности, когда концентрация ХГЧ еще низкая, тестирование может давать отрицательный результат. В этом случае необходимо провести повторное тестирование через 48 часов.
- Содержание ХГЧ может оставаться на обнаружимом уровне еще несколько недель после нормальных родов, кесарева сечения, спонтанных и хирургических абортов.
- После проведения тестирования для постановки окончательного диагноза следует проконсультироваться с врачом.

## **Условия хранения**

Хранить при температуре от 4 до 30°C в оригинальной упаковке в сухом, недоступном для детей месте.

Не замораживать.

Срок годности - 3 года с момента изготовления.