

## **Склад**

Ectoin<sup>®</sup>, вода, морська сіль.

## **Опис**

### **Що таке ЕКТОБРІС (ЕСТОВРЕАТН) і для чого він використовується**

ЕКТОБРІС (ЕСТОВРЕАТН) – це медичний виріб, що містить Ectoin<sup>®</sup> – натуральну молекулу з протизапальними і мембраностабілізуючими властивостями, що захищає клітини.

ЕКТОБРІС (ЕСТОВРЕАТН) являє собою ізотонічний розчин і може бути використаний як допоміжний засіб для зменшення запалення і полегшення симптомів захворювань дихальних шляхів, у разі алергічної або неалергічної астми, бронхіту або хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ).

ЕКТОБРІС (ЕСТОВРЕАТН) захищає і зволожує слизову оболонку дихальних шляхів, наприклад, при впливі твердих частинок, квіткового пилку, пилу або сухого повітря в опалювальних або кондиціонованих приміщеннях.

ЕКТОБРІС (ЕСТОВРЕАТН) запобігає симптомам алергічних реакцій дихальної системи при алергічній астмі, викликаній, наприклад, домашнім пилом або квітковим пилом.

Використання ЕКТОБРІС (ЕСТОВРЕАТН) як допоміжного засобу при лікуванні і для профілактики симптомів бронхіту запобігає висиханню слизових оболонок, розріджує в'язкий слиз, полегшуючи його відкашлювання.

ЕКТОБРІС (ЕСТОВРЕАТН) можна вводити за допомогою струменевих, сітчастих і ультразвукових небулайзерів.

ЕКТОБРІС (ЕСТОВРЕАТН) не містить консервантів.

## **Застереження**

- ЕКТОБРІС (ЕСТОВРЕАТН) не повинен використовуватися за наявності травм, наприклад, після операцій на органах дихальної системи.
- ЕКТОБРІС (ЕСТОВРЕАТН) не слід використовувати в разі підвищеної чутливості до Ectoin<sup>®</sup> або будь-якого іншого компоненту виробу.
- Якщо виникають побічні ефекти, використання ЕКТОБРІС (ЕСТОВРЕАТН) слід негайно припинити.

- Після використання однодозового контейнера залишки рідини слід утилізувати згідно чинних вимог з утилізації відходів, вони не призначені для повторного застосування.
- Пакування медичного виробу ЕКТОБРИС (ECTOBREATH) містить невеликі пластикові деталі, які можуть проковтнути маленькі діти. Щоб уникнути небезпеки аспірації, ЕКТОБРИС (ECTOBREATH) слід зберігати у недоступному для дітей місці.
- Не використовувати пошкоджені однодозові контейнери.
- Не вдихати занадто швидко.
- Медичний виріб призначено тільки для інгаляційного застосування, розчин не можна вводити шляхом ін'єкції або ковтати.
- ЕКТОБРИС (ECTOBREATH) не можна використовувати після закінчення терміну придатності.

### **Взаємодія з іншими лікарськими засобами**

Немає відомих взаємодій між ЕКТОБРИС (ECTOBREATH) та іншими інгаляційними розчинами.

Зачекайте не менше 15 хвилин між використанням ЕКТОБРИС (ECTOBREATH) і інгаляцією інших медичних виробів або лікарських засобів.

### **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Наразі немає даних про застосування ЕКТОБРИС (ECTOBREATH) у період вагітності або годування груддю.

Проконсультуйтеся з вашим лікарем або фармацевтом перед використанням даного медичного виробу, якщо ви:

- вагітні або годуєте груддю;
- не впевнені, чи вагітні ви чи ні.

### **Спосіб застосування**

Завжди використовуйте ЕКТОБРИС (ECTOBREATH) відповідно до цієї інструкції із застосування. Проконсультуйтеся з вашим лікарем або фармацевтом перед використанням, якщо у вас є питання.

Якщо вашим лікарем не призначено інше, вдихайте вміст одного однодозового контейнера (2,5 ml (мл)) по мірі необхідності, до двох разів на добу, використовуючи небулайзер. Переконайтеся, що небулайзер чистий та не забруднений. Діти віком 10 років і молодше повинні проводити інгаляцію під

наглядом дорослих.

1. Від'єднайте один однодозовий контейнер від стрічки.
2. Відкрийте однодозовий контейнер над лійкою розпилювача небулайзера. Для цього, тримаючи однодозовий контейнер за корпус, поверніть ковпачок, який знаходиться на його верхівці.
3. Вилийте весь вміст в ємність небулайзера, обережно натиснувши на контейнер. Невелика кількість рідини залишиться в контейнері.
4. Використовуйте небулайзер відповідно до інструкцій його виробника.
5. Дітям віком до 2 років може знадобитися спеціальне технічне обладнання (наприклад, маски з м'яким покриттям) для проведення інгаляції. Використовуйте обладнання, рекомендоване виробником небулайзера.

Щоб гарантувати стерильність продукту, кожен однодозовий контейнер призначений тільки для одноразового використання.

### **Побічні ефекти**

Як і всі інгаляційні продукти, інгаляція з використанням ЕКТОБРИС (ЕСТОВБРЕАТН) може призвести до побічних ефектів. У деяких випадках не можна виключити негативний вплив на перебіг астми. Будь ласка, повідомте вашого лікаря, фармацевта або уповноваженого представника в Україні ТОВ «Юрія-фарм» у разі виникнення побічних ефектів, пов'язаних з використанням ЕКТОБРИС (ЕСТОВБРЕАТН). У цьому випадку застосування медичного виробу слід негайно припинити.

Якщо стан погіршується, зверніться до лікаря або фармацевта.

### **Умови зберігання**

Термін придатності ЕКТОБРИС (ЕСТОВБРЕАТН) вказано на коробці і однодозовому контейнері.

ЕКТОБРИС (ЕСТОВБРЕАТН) слід зберігати при температурі від +2 °С до +25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

### **Упаковка**

По 2,5 ml (мл) у однодозових контейнерах, по 10 або 60 однодозових контейнерів у пачці.

### **Виробник**

bitop AG Stockumer Str. 28, 58453 Witten, Germany/ бітоп АГ Стокумер Стр. 28,  
58453 Віттен, Німеччина

**Уповноважений представник в Україні**

ТОВ «Юрія-фарм», Україна, 03038, м. Київ, вул. М. Амосова, 10.