

## **Склад**

Колоїдний розчин срібла 45-55 mg / l (мг / л), бісаболол, гіалуронова кислота, альгінат натрію, тригліцериди, гліцерин, ПЕГ-40 гідрогенізована касторова олія, Д-пантенол, тимол, диметикон, пропіленгліколь, сорбат калію, лізоциму гідрохлорид, сульфат цинку, вітаміни А і Е.

## **Опис**

У сезон гострих респіраторних захворювань важливий додатковий захист від вірусів, які в основному є їх збудниками. Для такого захисту дуже популярні бар'єрні засоби. До них відноситься Дефлю Захист Ніс гель. Він зменшує ризик проникнення інфекцій в організм через слизову оболонку носа, оскільки створює перешкоду для вірусів і бактерій за рахунок речовин, що утворюють гель, а також зміцнює цей бар'єр завдяки протівірусної і антибактеріальної активності колоїдного срібла. До того ж Дефлю Захист Ніс заспокоює запалену і подразнену шкіру навколо носа, тому він рекомендований при нежиті.

Комплекс альгінату натрію з бурих водоростей, тригліцеридів і гліцерину створює захисний бар'єр від вірусів і бактерій.

Колоїдне срібло має протівірусну, антибактеріальну та протигрибкову активність, тому може сприяти придушенню багатьох патогенів на слизовій оболонці носа.

При місцевому застосуванні (назальний) колоїдний розчин срібла має тимчасову прогнозовану дію проти вірусів, бактерій, грибів на слизовій оболонці і шкірі носа, але не впливає на функції органів і систем організму.

Колоїдне срібло може проявляти віруліцидну дію відносно вірусу грипу та інших респіраторних вірусів.

Бісаболол - активна речовина ромашки аптечної - має виражену протизапальну, антисептичну та ранозагоювальну дію.

Гіалуронова кислота зволожує і зменшує подразнення слизової оболонки носа і шкіри навколо носа.

Медичний виріб Дефлю® Захист Ніс гель застосовується як допоміжний засіб, що сприяє запобіганню гострих респіраторних вірусних захворювань, полегшення перебігу гострих запальних уражень носової порожнини і шкіри навколо носа.

## **Рекомендації щодо застосування**

Медичний виріб Дефлю® Захист Ніс гель застосовується як допоміжний засіб, що сприяє запобіганню гострих респіраторних вірусних захворювань, полегшення перебігу гострих запальних уражень носової порожнини і шкіри навколо носа.

## **Спосіб застосування та дози**

Для профілактики гострих респіраторних вірусних захворювань і грипу Дефлю Захист Ніс гель використовують протягом усього сезону підвищення захворюваності або при контакті з хворими на грип та ГРВІ.

Перед застосуванням відкрутіть на тубі захисний ковпачок і, тримаючи її вертикально вгору носиком, відріжте кінчик носика (близько 1 мм).

Невелику кількість гелю наносити на слизову оболонку носа 2-3 рази на добу. Помірним стисканням крил носа розтирати гель по слизовій оболонці.

При гострих запальних захворюваннях носа Дефлю® Захист Ніс гель наносити на слизову оболонку носа 4-5 разів на добу. Курс застосування становить 5-10 днів.

При подразненні шкіри навколо носа під час нежиті Дефлю® Захист Ніс гель наносити на уражену ділянку 4-5 разів на добу.

## **Протипоказання**

- застосування у дітей віком до 1 року;
- підвищена чутливість до компонентів.

Не застосовувати Дефлю® Захист Ніс гель після закінчення терміну придатності.

## **Застереження**

Дія засобу може викликати відчуття незначного печіння.

Можна застосовувати під час вагітності та годування груддю.

## **Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі від 5 ° С до 25 ° С в сухому, захищеному від прямого сонячного світла і недоступному для дітей місці.

Не зберігати в холодильнику. Після відкриття медичний виріб можна застосовувати протягом 3 місяців.

**Форма випуску**

Туба з гелем 10 г (г).

**Термін придатності**

3 роки.

**Виробник**

ТОВ «Чарлі», вул. Полтавський шлях, 123, г. Харьков, 61064, тел.: +38 (057) 751-80-34 для ТОВ «Дельта Медікел» 08132, Україна, м Вишневе, вул. Чорновола, 43, тел.: +38 (044) 593-33-55