

Опис

Тест дає можливість самотійного використання в один крок імунохроматографічного аналізу, проведеного для кількісного виявлення людського хоріонічного гонадотропіну (ХГЛ) у сечі з метою визначення вагітності протягом 7-11 днів після зачаття.

Особливості:

- висока якість;
- точність 99%;
- простота в експлуатації.

Спосіб застосування

Щоб застосувати, проведіть забір невеликої кількості сечі в чистий, сухий резервуар.

Потім потрібно покласти в нього тест відповідно до позначки.

Слідом за вбиранням сечі в смужці до межі контрольної лінії, потрібно висунути тест і провести оцінку протягом 2 - 5 хв.

Якщо у Вас немає вагітності – буде 1 смужка, якщо є – їх буде 2.