

Описание

Тест дает возможность самостоятельного использования в один шаг, иммунохроматографического анализа, произведенного для количественного выявления человеческого хорионического гонадотропина (ХГЧ) в моче с целью определения беременности.

Особенности:

- высокое качество;
- точность в 99%;
- с 7-го дня зачатия;
- простота в эксплуатации.

Способ применения

Чтобы применить, проведите сбор небольшого количества мочи в чистый, сухой резервуар.

Затем нужно положить в него тест согласно отметки.

Следом за впитыванием мочи в полоске до предела контрольной линии, нужно достать тест и провести оценку в течении 2 - 5 мин.

Если у Вас нет беременности - будет 1 полоска, если есть - их будет 2.