

Состав

100 г раствора содержит:

действующие вещества:

- Глутаровый альдегид - 9,5%.
- Глиоксаль - 7,5%.
- Дидецилдиметиламмоний хлорида - 9,6%.

вспомогательные вещества: стабилизаторы, красители, ароматические вещества, вода.

Описание

«Лизоформин 3000» - универсальное комбинированное альдегидное средство для обеззараживания медицинских изделий (дезинфекция + предстерилизационная очистка + стерилизация, дезинфекция высокого уровня), в том числе эндоскопов, для текущей, заключительной, профилактической дезинфекции всех типов поверхностей, для проведения генеральных уборок.

Показания

Дезинфекция, предстерилизационная очистка и стерилизация ИМН многократного и одноразового использования, эндоскопов, наркозно-дыхательной аппаратуры, куветов для новорожденных, отработанных материалов и так далее.

Дезинфекция и очистка всех типов поверхностей в помещениях, медицинских устройств и оборудования, посуды, инвентаря и так далее в учреждениях здравоохранения и лечебно-профилактических учреждениях всех профилей, в том числе детских и дневных стационарах, отделениях неонатологии, палатах, блоках и отделениях интенсивной терапии для новорожденных, манипуляционных, операционных, перевязочных кабинетах, хирургических, терапевтических, педиатрических, акушерских, гинекологических, офтальмологических, физиотерапевтических отделениях лечебно-профилактических заведений, родильных домах, поликлиниках, стоматологических клиниках и кабинетах, больницах, амбулаториях, диспансерах, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктах, центрах по трансплантации органов, медсанчастях и медпунктах, станциях скорой медицинской помощи, донорских пунктах, отделениях переливания крови, кареты скорой медицинской помощи, патологоанатомических отделениях,

санаториях, профилакториях, реабилитационных центрах, хосписах, заведениях социальной защиты населения, санпропускниках, учреждениях судебно-медицинской экспертизы, медицинских профильных центрах, клинических, микробиологических, биохимических, бактериологических, вирусологических, серологических и других профильных диагностических лабораториях и так далее.

Противопоказания

Индивидуальная чувствительность к компонентам средства.

Основные свойства

Лизоформин 3000 обладает такими свойствами:

- качественно дезинфицирует даже при минимальной концентрации;
- удаляет белки, жиры, остатки крови;
- сохраняет свойства даже после замерзания и оттаивания;
- биологически распадается на кислород и воду;
- можно использовать для особо чувствительных материалов;
- не имеет запаха;
- обеззараживает особо опасные инфекции (чуму, тиф и др.).

Срок годности

3 года от даты производства.

Условия хранения

Хранить в сухом, недоступном для детей месте.

Упаковка

По 20 мл раствора в пакете.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ООО "Бланидас", Украина.