

Описание

Тест-полоска для определения овуляции Тета №1 - тест для определения периода овуляции по данным мочи. Он поможет определить время, когда вероятность забеременеть наибольшая: при приближении времени наступления овуляции концентрация лютеинизирующего гормона (ЛГ) в моче существенно возрастает.

Во время овуляции яйцеклетка выходит из яичника. Поскольку яйцеклетка может быть оплодотворена только в течение 6-24 часов после овуляции, выявление овуляции заранее является очень важным.

Тест-полоска для определения овуляции Тета №1 производится с помощью веществ, реагирующих на повышение концентрации лютеинизирующего гормона в моче. Он работает по такому же принципу, как и тесты для определения беременности.

Способ применения

Не используйте образец первой утренней мочи, ведь ЛГ синтезируется в организме с утра. Он появится в моче позже, в течение дня. Лучше всего проводить анализ в период с 10.00 до 20.00.

- Ограничьте потребление жидкости за 2 часа перед проведением теста, ведь чрезмерное содержание жидкости может помешать определению всплеска ЛГ в моче.

- Тест необходимо проводить при комнатной температуре (18-30 °С).

Выньте тест-полоску из герметичной пачки.

- Удерживая тест-полоску вертикально, опустите в сосуд с образцом мочи таким образом, чтобы стрелки указывали вниз. Не погружайте полоску глубже линии maximum.

- Выньте полоску через 5 секунд и положите ее на чистую сухую поверхность.

- Дождитесь появления цветных полосок. Результат следует оценивать не ранее чем через 10 минут. Не принимайте во внимание результат тестирования через 30 минут.

Интерпретация результатов

Положительный результат: появление двух цветных полосок, при этом полоска теста одинаково темная или даже темнее контрольной полоски. Означает, что овуляция произойдет через следующие 24-48 часов. Лучшее время забеременеть в этом случае - после 24 часов, но не позднее 48 часов.

Отрицательный результат: появление только одной цветной полоски в контрольной зоне теста, или если полоска теста светлее контрольной, означает, что всплеска ЛГ нет.

Преимущества:

- Основное преимущество теста для определения овуляции Тета №1 заключается в повышенной чувствительности - 30 мМЕ/мл, что позволяет точно определять период овуляции. Компания-производитель гарантирует высокую точность теста - на уровне 97-99%.
- Удобный и простой в использовании тест для оптимальной самодиагностики.
- Тест изготовлен из высококачественных материалов.