

Опис

Голки BD Vacutainer® PrecisionGlide™ представляють собою стерильні вироби одноразового застосування для взяття венозної крові в одну або кілька пробірок. Кожен виріб складається з двосторонньої голки, закріпленої в пластиковому корпусі з гвинтовим різьбленням. Один кінець голки призначений для проникнення в вену, а інший є технічним і ув'язнений в гумовий клапан. Коли технічний кінець голки проколює кришку пробірки, клапан, що закриває його, зсувається під тиском пробірки.

Пробірку заповнюють до номінального обсягу наповнення і витягують з тримача. При цьому клапан знову закриває технічний кінець голки, перешкоджаючи току крові до приєднання наступної пробірки. Голки упаковані в два пластикових кожуха: кольоровий і білий, які запечатані паперової пломбою для контролю розтину.

Голки призначені для спільного використання з власниками та вакуумними пробірками BD Vacutainer®.