

Описание

Тест струйный Ultimate это одношаговый иммунохроматографический анализ, выполняемый самостоятельно, разработанный для количественного определения человеческого хорионического гонадотропина (ХГЧ) в моче с целью выявления беременности.

Свойства

- комфорт и гигиеничность;
- в любое время;
- до задержки менструации;
- точность результата 99,9%;
- в любых условиях;
- не нужно собирать мочу;
- с 7-го дня зачатия;
- чувствительность 10 мМЕ/мл.

Способ применения

- Достаньте тест из герметичной упаковки, открыв по линии отрыва. Снимите защитный колпачок.
- Держите изделие концом с абсорбентом вниз. Подставьте конец с абсорбентом под струю мочи примерно на 5-7 секунд. Наденьте защитный колпачок.
- Как вариант, мочу можно собрать в чистую чашу и затем погрузить туда конец с абсорбентом примерно на 5-10 секунд, пока образец мочи не переместится к окну для считывания результата теста.
- Наденьте защитный колпачок. Дождитесь появления цветных полосок и начинайте считывать результаты. Положительный результат можно определить сразу, как только полоски проявятся.
- Отрицательный результат может быть подтвержден через 5-10 минут. Прежде чем интерпретировать результаты, убедитесь, что фон тестовой зоны имеет белый цвет.
- Проверьте результат через 10 минут, следуя инструкциям в разделе "Интерпретация результатов".