

Опис

Експрес-тест Express Test мультипанель наркотики

Мультипанель виявлення 5 видів наркотичних речовин: опіати, амфетамін, екстезі, марихуана, метамфетамін.

Експрес-тести визначення наркотиків - це одноразові пристрої, які можуть виявити факт вживання наркотиків у домашніх умовах, без спеціальної апаратури. Точність результату таких тестів сягає 95-99%.

Як працюють діагностичні тести на визначення наркотиків у сечі:

- При вживанні наркотиків в організмі людини утворюється метаболіт, який можна виявити за допомогою тесту відповідно до речовини, що вживається. Виявлення наркотичних речовин та їх метаболітів ґрунтується на специфічній взаємодії антиген-антитіло шляхом латерального хроматографічного проточного імуноаналізу.
- Метаболіти виводяться із сечі протягом певного часу після вживання, тому за допомогою швидких тестів ExpressTest можна визначити не просто стан сп'яніння, а сам факт вживання наркотику.

Вплив наркотиків

- Опіати: недовге почуття ейфорії, потім розслабленість, млявість, сонливість, втома, уповільнення дихання та серцебиття, зниження спраги та апетиту, зниження чутливості до болю та інші.
- Екстезії: ейфорія, зниження страху, підвищення рівня довіри та відкритості.
- Метамфетамін: ейфорія, сексуальне збудження, працездатність, приплив сил.
- Марихуана: напади радості, паніки та параної, прискорене серцебиття, втрата рівноваги, труднощі мислення.
- Амфетами: дія на психіку починається через 30-60 хвилин. Людина відчуває покращення настрою, приплив сил, неймовірну розумову та фізичну працездатність.

Спосіб застосування

Занурте на кілька секунд тест-смужку в сечу або слину і вже через 5 хвилин Вам буде відомий результат.

Оцінка результатів:

- У кожному тесті є тестова та контрольна зони, де при негативному результаті з'являються дві червоні або рожеві лінії: тестова та контрольна (наркотика немає).
- Якщо в сечі знаходяться метаболіти наркотичних речовин, тестова лінія стає невидимою, з'являється лише одна червона чи рожева контрольна лінія (наркотик є).

Термін придатності

24 місяці

Термін придатності

24 місяці

Умови зберігання

зберігати при температурі від +2 до +30°C.