

## **Способ применения**

1. Вставьте батарейки ААА.
2. Вставьте палец в прорезиненное отверстие пульсоксиметра ногтевой пластиной вверх.
3. Нажмите кнопку на передней панели прибора.
4. Не двигайте пальцем и не меняйте положение тела пока продолжается диагностика.
5. Нажмите кнопку, если хотите изменить режим отображения.
6. Прочитайте результаты исследования на экране.
7. Прибор автоматически выключится через 8 секунд, если нет сигнала для диагностики.