

Опис

Компресорний небулайзер Dr.Frei Turbo Mini представляє собою прилад, який перетворює рідку лікарську речовину в дрібнодисперсний аерозоль під впливом стиснутого повітря. Аерозоль містить великі і дрібні частинки. При диханні під впливом сили тяжіння великі частки осідають на стінках верхніх дихальних шляхів, а дрібні частинки встигають досягти нижніх відділів бронхів. Таким чином, лікарська речовина потрапляє в усі відділи бронхіального дерева, включаючи найдрібніші бронхи та альвеоли, а також проникає в кровоносні судини в стінках альвеол у високих терапевтичних дозах при незначних чи нульових побічних ефектах.

Показання до застосування

- Гострі респіраторні захворювання;
- обструктивні захворювання легенів;
- хронічні запальні процеси дихальних шляхів, такі як хронічний бронхіт, бронхіальна астма (у т.ч. при хронічній, нестабільній, при важкому загостренні БА), хронічному фарингіті;
- інфекції дихальних шляхів;
- порушення якості секрету і його відділення в бронхах;
- різні види кашлю.

Переваги

- Небулайзерна терапія дає можливість швидкого впливу на зону запалення високими дозами ліків, що підвищує ефективність проведеного лікування і знижує ризик побічних дій на інші органи. Небулайзерна терапія є найбільш економічним способом лікування з точки зору цільової витрати лікарської речовини, широко застосовується для дітей, літніх людей, ослаблених пацієнтів.
- Широкий спектр застосовуваних медикаментів.
- Підходить для дітей та дорослих.

Технічні характеристики

- Швидкість розпилення: 0.3 мл / хв
- Розмір частинок при інгаляції: 3 мкм
- Об'єм розпилювальної камери: від 2 до 10 мл
- Остаточний об'єм розпилювальної камери: 0,85 мл
- Рівень шуму: 55 дБ

- Розміри: 167 × 106 × 164 мм
- Вага: 1,3 кг
- Робочий цикл приладу: 30 хв вкл. / 30хв викл

Комплектація

- Компресор Turbo Mini
- розпилювальна камера
- повітряна трубка
- доросла маска
- дитяча маска
- ротовий мундштук
- носовий мундштук - канюля назальная
- запасні повітряні фільтри - 5 шт.
- інструкція
- гарантійний талон
- упаковка

Застереження

У небулайзері КАТЕГОРИЧНО заборонено використовувати:

- масляні препарати (ефірні масла)
- самостійно приготовані відвари і настої трав
- суспензії і сиропи.

Дезінфекція приладу

- Перед застосуванням камеру, ротовий мундштук, носовий мундштук необхідно прокип'ятити протягом 10 хвилин або обробити 3% розчином перекису водню, промити теплою проточною водою, струсити і висушити.
- Маски не кип'ятити, обробляємо їх 3% розчином перекису водню, миємо й сушимо.
- Після кожного використання обов'язково робимо таку ж процедуру з аксесуарами, які використовували.
- Повітропровідну трубку і сам компресор протираємо вологою серветкою.
- Небулайзерна камера підлягає очищенню після кожного використання в той же день.
- Виробники рекомендують перевіряти повітряний фільтр кожні 30-60 днів використання інгалятора. У разі, якщо фільтр потемнів, його слід замінити.
- Слідкуйте за тим, щоб фільтр був сухим. Чистити і мити фільтр не можна.