

## **Состав**

Смесь полисилоксанов.

## **Описание**

НАСКАР – гипоаллергенный, прозрачный, быстросохнущий силиконовый гель для лечения рубцов различного происхождения.

Гель НАСКАР легко наносится на все участки кожи, включая такие открытые участки, как лицо и шея; а также суставы и волосяные участки без необходимости бриться.

Если использовать гель в соответствии с инструкцией, он быстро высыхает до формы тонкой силиконовой пленки. Защитный слой, который является газопроницаемым и водонепроницаемым, увлажняет и защищает рубец от химического и бактериального воздействия, позволяет рубцу нормализовать цикл синтеза коллагена.

Гель НАСКАР смягчает и разглаживает рубцы, устраняет зуд и дискомфорт, покраснение и изменение цвета рубцов. Гель НАСКАР применяется для лечения всех видов рубцов, в том числе в результате: общих хирургических операций, травм, застарелых ран, кесарева сечения, ожогов, укусов, акне и других заболеваний кожи.

## **Показания**

Гель НАСКАР применяется для предупреждения и лечения всех типов рубцов, в том числе келоидных и гипертрофических рубцов. НАСКАР может применяться вместе с другими инвазивными методами для улучшения общего результата, включая хирургическое иссечение и ушивание, инъекции и сдавливающие повязки. Гель НАСКАР можно применять для кожи детей любого возраста, женщин в период беременности и кормления грудью; для чувствительной и склонной к аллергиям кожи.

Для получения наилучшего результата рекомендовано начинать использование НАСКАР как возможно раньше после периода эпителизации раны. После оперативного вмешательства с наложением швов НАСКАР применяется начиная с 10 дня после операции.

## **Противопоказания**

При индивидуальной чувствительности к компонентам препарата.

### **Способ применения и дозы**

Убедитесь, что рубец чистый и сухой. Нанесите тонкий слой геля НАСКАР на рубец и оставьте высыхать. Применяйте гель на пораженные участки кожи один или два раза в день, или по назначению врача. Для достижения наилучшего результата необходимо обеспечить постоянный контакт геля с рубцом. При условии правильного использования геля, он полностью высыхает в течении 5-7 минут. Если на полное высыхание необходимо больше времени, то, возможно, вы наносите слишком много геля. Осторожно промокните избыток геля салфеткой и оставьте высыхать. Как только гель высох, Вы можете наносить солнцезащитные средства, косметику, сдавливающие повязки или гипс.

### **Условия хранения**

Хранить вдали от источников тепла в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте. Хранить при температуре не выше 25 °С.

### **Упаковка**

По 15 г в тубе, по 1 тубе в упаковке.

### **Производитель**

Артесфарм Сп. з о.о, Польша.

### **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Ул. Солеки 81 Б, лок. А-51, 00-382 Варшава, Польша.