

Властивості

Opti-Free Express - багатофункціональний дезинфікуючий розчин для всіх типів контактних лінз з сильною антимікробною дією. Підходить для чутливих очей.

Opti-Free Express: особливості та переваги розчину

- використовуйте Opti-Free Express кожен день, щоб додатково не очищати лінзи пероксидними системами і ензимними таблетками;
- змазуючий компонент Tetronic 1304 утримує вологу на поверхні лінзи, створюючи тонку гідрофільну плівку і продовжуючи комфортне носіння;
- посилена формула дезінфекції видаляє бактерії, дріжджові і цвілеві грибки, акантамеб;
- видаляє білкові, ліпідні та кальцієві відкладення;
- після обробки розчином поверхню лінзи відштовхує відкладення;
- безпечний консервант POLYQUAD не проникає в епітеліальні клітини рогівки і не шкодить очам;
- підходить для чутливих очей;
- сумісний з усіма типами контактних лінз.

Спосіб застосування

1. Змочіть зняту лінзу 2-3 краплями розчину і протріть подушечкою пальця з двох сторін протягом 20 секунд.
2. Після механічного очищення сполосніть обидві сторони лінзи розчином.
3. Сполосніть контейнер для лінз розчином Opti-Free Express.
4. Заливайте тільки свіжий розчин в контейнер; щільно закривайте флакон.
5. Залиште лінзи в розчині на 6 годин або на ніч.
6. З ранку лінзи очищені і готові до безпечного використання і комфортному носінню.
7. Використовуйте відкритий флакон протягом 6 місяців.