

Загальні характеристики

Multison - це універсальний багатоцільовий розчин латвійської компанії Henson. Він призначений для ополіскування, очищення, дезінфекції та зберігання всіх видів м'яких контактних лінз.

До складу Multison входить:

- **Боратний буфер.** Забезпечує оптимальний рН розчину і служить ідеальною основою для інших компонентів.
- **Полігексанід.** Надає дезінфікуючий і антисептичну дію, тобто пригнічує життєдіяльність шкідливих мікроорганізмів.
- **ЕДТА.** Пов'язує і видаляє з поверхні лінз білкові відкладення. Підсилює знезаражувальне дію інших компонентів.
- **Сополімер поліоксітелену і поліоксипропілену.** Активно очищає контактні лінзи від пилу, бруду і різних відкладень.

Розчин Multison не можна назвати сучасним, оскільки він не містить новомодні зволожуючі і очищаючі компоненти.

Зверніть увагу! До складу розчину не входять зволожуючі агенти. Тому при появі сухості вам доведеться додатково використовувати зволожуючі краплі.

Спосіб застосування

1. Змочіть зняту лінзу 2-3 краплями розчину і протріть подушечкою пальця з двох сторін протягом 20 секунд.
2. Після механічного очищення сполосніть обидві сторони лінзи розчином.
3. Сполосніть контейнер для лінз розчином Multison.
4. Заливайте тільки свіжий розчин в контейнер.
5. Залиште лінзи в розчині на 6 годин або на ніч.
6. З ранку лінзи очищені і готові до безпечного використання і комфортному носінню.
7. Використовуйте відкритий флакон протягом 4 місяців.