

Описание

Пластырь для ран №200 на тканевой основе 19x72мм "DR. BAUER"

Универсальные наборы пластырей с подушечкой на тканевой основе широкого спектра использования. Форма выпуска стрип.

Рекомендации по применению

Предназначен для фиксации поврежденных пальцев, при оказании первой помощи в случае мелких ран, царапин, порезов.

Способ применения

Перед использованием вынуть пластырь из бумажного пакета и снять защитную пленку, после чего подушечкой приложить к ране, а края пластыря прижать к коже. Пластырь может оставаться на коже в течение суток.

Противопоказания

Гиперчувствительность к основе пластыря, клеящему веществу.

Побочные эффекты

Раздражение кожи в месте приклеивания.

Условия хранения

Хранить при температуре от 5°C до 35°C.