

## **Опис**

Сечоприймач дитячий (для хлопчиків) одноразовий стерильний об'ємом 100 мл. Призначений для збору сечі у дітей грудного віку.

## **Особливості**

- забезпечений спеціальним гіпоалергенним липким фіксуєчим пристроєм, легко і щільно кріпиться до шкіри, що не робить тиску на підлеглі тканини;
- має м'який пластиковий резервуар, який може приймати будь-яку форму для того, щоб під час збору сечі дитина могла бути одягнена у звичайний одяг, зокрема одноразовий або багаторазовий підгузник, пелюшки або повзунки;
- нанесене градування для визначення об'єму виведеної рідини;
- адаптований під анатомічні особливості хлопчиків;
- індивідуальна стерильна упаковка

## **Спосіб застосування**

### ***Послідовність дій при зборі сечі:***

- Вимити руки.
- Підмити дитину і обсушити (!!!) зовнішні статеві органи.
- Відкрити упаковку з сечоприймачем і звільнити клейку поверхню від захисної плівки.
- Одягти сечоприймач. У хлопчиків і дівчаток накладання сечоприймача відрізняється. У хлопчиків статеві органи і мошонка або частина її опускаються в сечоприймач. Клейка поверхня сечоприймача прикріплюється до шкіри біля кореня статевого члена і по промежині або по мошонці. Резервуар прямує вгору
- Після закінчення збору сечі сечоприймач акуратно знімається. Статеві органи обмиваються водою, обсушуються і обробляються кремом.