

Состав

100 г раствора содержат 100 неразведенной гипертонической (23 г/л NaCl) стерильной морской воды.

Показания

- промывание носовой полости;
- уменьшение отека при простуде, рините и синусите;
- дополнительное лечение патологии лор-органов.

Противопоказания

- повышенная чувствительность к компонентам изделия медицинского назначения;
- возраст до 3-х месяцев.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям в возрасте от 3-х месяцев - по 1-3 впрыску в каждую ноздрю 2-3 раза в день.

Детям до 2-х лет промывания рекомендуется проводить в положении лежа:

Наклонить голову ребенка в сторону:

1. Ввести распылитель в носовой ход, который находится сверху.
2. В течение 2-3 секунд нажать на распылитель, чтобы промыть нос.
3. Посадить ребенка, вытереть жидкость вытекает, помочь ребенку очистить нос.
4. Можно повторить процедуру (при необходимости).
5. Провести процедуру с другим носовым ходом.

Детям старше 2-х лет и взрослым:

1. Наклонить голову в сторону.
2. Ввести распылитель в носовой ход, который находится сверху.
3. В течение 2-3 секунд нажать на распылитель, чтобы промыть нос.
4. Продуть нос, чтобы очистить его от слизи.
5. Можно повторить процедуру (при необходимости).
6. Провести процедуру с другим носовым ходом.

Процедуру наиболее эффективно проводить до еды.

После использования распылитель промыть водой.

Не использовать контейнер для нескольких человек.

Хранить баллон и распылитель в коробке.

Применение в период беременности или кормления грудью - противопоказаний нет.

Меры предосторожности

В редких случаях могут возникать аллергические реакции.

В случае появления каких-либо нежелательных явлений необходимо прекратить применение препарата и обратиться к Вашему врачу.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в месте, которое недоступно для детей.

Упаковка

По 50 мл во флаконе, по 1 флакону в упаковке.

Производитель

Лабораториз УРГО, Франция.