

## **Властивості**

**Крема МАКС Фіксація + Прилягання з потрібною дією:** сильна фіксація, герметичність та захист м'яких тканин. Крем допомагає вирішити 2 проблеми: посилення фіксації для надійного кріплення зубного протеза та зменшення потрапляння часточок їжі під зубний протез через недостатню фіксацію. Фіксує зубні протези до 12 годин, в 5 разів скорочує потрапляння часточок їжі під зубний протез.

## **Загальні характеристики**

Крем Корега МАКС Фіксація + Прилягання заповнює проміжки між поверхнею зубного протеза та протезним ложем, що допомагає попередити потрапляння часточок їжі. Конусоподібна конструкція туби забезпечує легке видавлювання крему. Вузкий носик-аплікатор для точкого нанесення дозволяє використовувати чітку кількість крему, враховуючи форму та розміри зубного протезу. Носик для точкового нанесення забезпечує кращу видимість та неперевершений контроль кількості крему, що видавлюється. Крем Корега МАКС Фіксація + Прилягання знижує дискомфорт за рахунок зменшення кількості часточок їжі, що потрапляє під протез. Крем Корега МАКС Фіксація + Прилягання не містить цинк. Покращує фіксацію, стабілізацію, жувальну ефективність та підвищує рівень комфорту при використанні протезу.

## **Спосіб застосування**

### **Як зафіксувати зубний протез:**

1. Очистіть та висушіть протез.
2. Нанесіть фіксуєчий крем на протез смужками, як показано на малюнку, але не дуже близько до країв зубного протезу.

Верхній протез: нанесіть фіксуєчий крем довгою безперервною смужкою. Додайте дві короткі смужки на середину протеза.

Нижній протез: нанесіть фіксуєчий крем довгою безперервною смужкою.

Частковий протез: нанесіть фіксуєчий крем у дві короткі смужки.

3. Прополощіть рот перед тим, як вставити протез.
4. Вставте протез в ротову порожнину, щільно притисніть і прикусіть на декілька секунд для надійної фіксації.

## **Як зняти зубний протез:**

1. Прополощіть рот теплою водою.
2. Повільно вийміть зубний протез, гойдаючими рухами.
3. Видаліть залишки фіксуючого крему з протезу та ротової порожнини за допомогою теплої води та м'якої щітки.
4. Для повного очищення протеза використовуйте таблетки для очистки зубних протезів КОРЕГА.

## **Особливості застосування**

Почніть із застосування невеликої кількості крему. Використовуйте більшу кількість крему, якщо необхідно. Занадто велика кількість крему може витікати з-під протезу. Якщо це сталося, наступного разу нанесіть меншу кількість крему. Вам може знадобитися кілька спроб, щоб знайти потрібну кількість. Використовуйте один раз на день для надійної фіксації. Якщо Вам потрібно застосовувати крем більше ніж один раз на день, проконсультуйтеся з Вашим стоматологом.

Якщо у Вас виникне алергічна реакція або дискомфорт, негайно припиніть використання. Ковтання невеликої кількості крему (за умови дотримання інструкції щодо застосування) може іноді траплятися і є нешкідливим. Невідповідно підібрані зубні протези можуть погіршити Ваше здоров'я. Регулярно відвідуйте стоматолога, щоб перевіряти правильне встановлення Вашого протеза. Тримайте ковпачок та накінецьник сухими, щоб не забивався вхідний отвір. Закривайте ковпачок після використання.

## **Склад**

Calcium/sodium PVM/MA copolymer, petrolatum, cellulose gum, paraffinum liquidum.