

Опис

Універсальний безальдегідний нехлорний засіб для знезараження виробів медичного призначення (дезінфекція + передстерилізаційне очищення + дезінфекція високого рівня), для поточної, заключної, профілактичної дезінфекції та одночасного миття всіх типів поверхонь, для проведення генеральних прибирань.

Властивості:

- засіб без хлору і альдегідів;
- універсальне застосування;
- відмінно очищує поверхні інструментів без додаткового механічного впливу;
- забезпечує мінімальний контакт медичного персоналу з інфікованим інструментарієм;
- знищує мікробіологічну плівку всередині ендоскопів;
- робочі розчини засобу мають виражені миючі, дезодоруючі, змочувальні, емульгуючі властивості;
- видаляють механічні, білкові, жирові забруднення, залишки крові, залишки лікарських засобів із зовнішніх поверхонь, внутрішніх каналів та порожнин виробів медичного призначення, гомогенізують мокротиння та інші виділення;
- має бактерицидну, туберкулоцидну, віруліцидні, фунгіцидною, спороцидно дією;
- пролонговану за часом антимікробну дію;
- термін зберігання невикористаного робочого розчину засобу становить 28 діб.

Рекомендації щодо застосування

Дезінфекція, передстерилізаційного очищення і дезінфекції високого рівня медичних виробів багаторазового та одноразового використання, ендоскопів, наркозно-дихальної апаратури, кувезів для новонароджених, відпрацьованих матеріалів і т.д.

Дезінфекція та очищення всіх типів поверхонь в приміщеннях, медичних пристроях та устаткування, посуду, інвентарю і т.п. в установах охорони здоров'я та лікувально-профілактичних закладах усіх профілів, в тому числі дитячих і дієтических стаціонарах, відділеннях неонатології, палатах, блоках і відділеннях інтенсивної терапії для новонароджених, маніпуляційних, операційних, перев'язувальних кабінетах, хірургічних, терапевтичних, педіатричному,

акушерсько гінекологічний, офтальмологічних , фізіотерапевтичних відділеннях лікувально-профілактичних закладів, пологових будинках, поліклініки, стоматологічних клініках і кабінетах, лікарнях, амбулаторіях, диспансерах, фельдшерських і фельдшерських-акушерських пунктах, центрах з трансплантації органів, медсанчастини і медпунктах, станціях швидкої медичної допомоги, донорських пунктах, відділеннях переливання крові, карети швидкої медичної допомоги, патологоанатомічних відділеннях, санаторіях, профілакторіях, реабілітаційних центрах, хосписах, закладах соціального захисту населення, санпропускниках, установах судово-медичної експертизи, медичних профільних центрах, клінічних, мікробіологічних, біохімічних, бактеріологічних, вірусологічних, серологічних та інші профільних діагностичних лабораторіях і т.д.

Спосіб застосування

Режими використання робочих розчинів:

1. Традиційне прибирання 100 мл / м².
2. Прибирання з системою «Вермоп»: 15 мл / м².

Склад

Композиція ЧАС, ферменти (ліпаза, амілаза, протеаза).