

## **Описание**

Для фиксации любого вида повязок после операций, для закрепления катетеров, зондов, тампонов и других изделий медицинского назначения.

Лицевая часть не содержит клея, а обратная полностью покрыта клейким веществом.

Гладкий, без пятен, без дыр.

Чистый, нестерильный.

## **Способ применения**

- Разорвать индивидуальную упаковку, достать пластырь;
- Отклеить нетканый материал из клейкого основания;
- Наложить на чистую и сухую кожу;
- При появлении индивидуальных аллергических реакций – прекратить использование и обратиться к врачу;
- После использования утилизировать согласно установленным нормам.

## **Условия хранения**

- Предотвращать попадание влаги;
- Избегать попадания прямых солнечных лучей и нагревания;
- Хранить при температуре от 10 до 25°C