

Состав

Медицинское изделие **Спрей для горла Бриомосс Сильвер** не содержит спиртовых экстрактов, поэтому не раздражает чувствительную слизистую горла и рта.

Количество активных ингредиентов в 1 дозе (0,1 мл (мл)):

Наносеребро, 100 ppm – 0,0015 mg (мг), экстракт исландского мха (*Cetraria islandica*) – 0,05 mg (мг).

Другие ингредиенты: деминерализованная вода, глицерин, сорбит, ароматизатор клубники, лимонная кислота, полисорбат 20, масло перечной мяты, сукралоза, калия сорбат.

Форма выпуска

Медицинское изделие в форме спрея (жидкость во флаконе с аппликатором) 30 мл (мл) (300 доз).

Рекомендации по применению

Медицинское изделие **Спрей для горла БРИОМОСС СИЛЬВЕР** может быть применен с целью поддержки сопутствующих состояний:

- тонзиллит;
- состояния после удаления небных миндалин;
- воспаление слизистой глотки;
- воспаление слизистой ротовой полости.

Показания

Медицинское изделие предназначено для взрослых и детей старше 6 лет.

Противопоказания

Не применяйте, если у вас есть гиперчувствительность (аллергия) к любому из ингредиентов изделия.

Избегайте контакта с глазами.

Прекратите применение при возникновении любого дискомфорта.

О каких-либо побочных эффектах, связанных с использованием медицинского изделия, необходимо уведомить уполномоченного представителя производителя в Украине (импортера) и соответствующий государственный компетентный орган.

Не использовать по истечении срока годности.

Использование медицинского изделия беременным и кормящим грудью, возможно только после консультации с врачом.

Способ применения

Перед первым применением несколько раз нажмите на дозатор, чтобы наполнить его жидкостью.

Поместите аппликатор в рот и нажатием на дозатор распылите 1-2 дозы в направлении горла.

Рекомендуется применять продукт 3-4 раза в день по 1-2 дозы за один раз после еды.

По гигиеническим соображениям и с целью предотвращения распространения инфекций рекомендуется индивидуальное

использование флакона.

После каждого использования наконечник необходимо промыть под проточной водой и осторожно высушить.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре 5-25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Не использовать при повреждении упаковки.

Производитель

Производитель:

ГЛОБАЛ ФАРМА СИЭМ Эс.Эй., ул. Березув, 49А, 26-130 Сухедньюв,
Польша

Уполномоченный представитель в Украине (импортер):

ООО «Органосин ЛТД» Украина, 03022, Киев, ул. Амурская, 6-Л.

Уполномоченный представитель в Украине (импортер) осуществляет функции принятия претензий от потребителей.