

Описание

Обеспечивает мгновенное обезболивающее действие и особую защиту вальгусной деформации («косточки») большого пальца стопы.

Состав

Полимерный гель с медицинскими маслами для дополнительного увлажнения кожи

- 1 шт. в уп.
- Размер универсальный (эластичный)

Способ применения

1. Промойте и высушите участок кожи, где будет использоваться изделие.
2. Наденьте защитный чехол на большой палец стопы, разместив гелевую подушечку на вальгусную «косточку».
3. После снятия изделия промойте теплой водой и высушите естественным путем (без использования нагревательных приборов и избегая попадания прямых солнечных лучей).
4. После высыхания чехол готов к повторному использованию.

Показания

- Подагра
- Бурсит суставов пятого пальца
- Начальная и средняя степень вальгусной деформации мизинца
- Для уменьшения боли в суставе мизинца и амортизации боковых ушибов

- Облегчает ходьбу, защищая имеющиеся мозоли (в том числе сухие) или отверждение.

Предостережение

Не рекомендуется использовать более 16 часов в день.

Только для наружного местного использования.

Не допускать контакта с открытыми ранами.

Людам с диабетом и проблемами кровообращения перед использованием изделия следует проконсультироваться с врачом.

Хранить в недоступном для детей месте.