

## **Описание**

Для защиты пальцев ног от трения и образования мозолей с молотковидной деформацией, вросшими ногтями и мозолями.

## **Состав**

Полимерный гель с медицинскими маслами для дополнительного увлажнения кожи.

2 шт. в уп.

Размер L Ø25 мм, длина 55 мм

## **Способ применения**

1. Промойте и высушите участок кожи, где будет использоваться изделие.
2. При необходимости отрежьте с помощью ножниц лишнюю длину от напальчника, в зависимости от размера вашего пальца, на который будет надеваться изделие.
3. Наденьте напальчник на палец ноги.
4. После снятия промойте теплой водой напальчник и высушите естественным путем (избегая попадания прямых солнечных лучей).
5. После высыхания изделие готово к повторному использованию.

## **Показания**

- Для защиты мозолей, отверждений, вросших ногтей, кутикулы, молотковидных пальцев.
- Уменьшение давления и трения на поврежденный палец
- Для увлажнения и заживления старых мозолей и отверждений

## **Предостережение**

Не рекомендуется использовать более 16 часов в день.

Только для наружного местного использования.

Не допускать контакта с открытыми ранами.

Людам с диабетом и проблемами кровообращения перед использованием изделия следует проконсультироваться с врачом.

Хранить в недоступном для детей месте.