

## **Описание**

Предназначен для обеспечения обезболивающего действия и амортизации в зоне пятки, снижения ударной нагрузки на стопу, суставы и позвоночник.

## **Состав**

Основание из 100% медицинского силикона со вставкой синего цвета из 100% медицинского силикона повышенной мягкости

## **Способ применения**

1. Разместите изделие в обуви, под зону пятки.
2. Во избежание нарушения равновесия используйте одновременно подпяточник для обеих ног.
3. После снятия обуви промойте изделие теплой водой или протрите влажной тряпкой и высушите естественным путем (без использования нагревательных приборов, избегая попадания прямых солнечных лучей).
4. После высыхания изделие готово к повторному использованию. При необходимости можно присыпать тальком.

## **Показания**

- Для уменьшения ударной нагрузки на позвоночник, суставы, что делает его рекомендованным для женщин в период беременности
- Реабилитационный период после травмы пяточной кости
- Для усталых ног и в случаях, когда приходится проводить много времени стоя
- Пятковая шпора
- Мозоли, трещины, травмы и сухость пятки

- Для уменьшения нагрузки на пятку во время занятия спортом

### **Предостережение**

Не рекомендуется использовать более 16 часов в день.

Только для наружного местного использования.

Не допускать контакта с открытыми ранами.

Людам с диабетом и проблемами кровообращения перед использованием изделия следует проконсультироваться с врачом.

Хранить в недоступном для детей месте.