

## **Описание**

Предназначена для разделения 1-го и 2-го пальцев ног и удержания их в правильном положении. Профилактика развития бурсита.

## **Состав**

Полимерный гель с медицинскими маслами для дополнительного увлажнения кожи

2 шт. в упаковке.

## **Способ применения**

1. Промойте и высушите участок кожи, где будет использоваться изделие.
2. Наденьте разделитель между 1-м и 2-м пальцами стопы.
3. После снятия изделия промойте теплой водой и высушите естественным путем (без использования нагревательных приборов и избегая попадания прямых солнечных лучей).
4. После высыхания разделитель готов к повторному использованию.

## **Показания**

- Для удержания пальцев в правильном положении
- Лечение и профилактика бурсита
- При молотовидных пальцах
- Коррекция позиции пальцев после травмы или операции
- Мозоли между пальцами

## **Предостережение**

Не рекомендуется использовать более 16 часов в день.

Только для наружного местного использования.

Не допускать контакта с открытыми ранами.

Людам с диабетом и проблемами кровообращения перед использованием изделия следует проконсультироваться с врачом.

Хранить в недоступном для детей месте.