

Описание

Предназначен для обеспечения обезболивающего и амортизирующего действия в передней части стопы

Состав

Полимерный гель с медицинскими маслами для дополнительного увлажнения кожи

Клеевой слой

1 пара в упаковке.

Размер универсальный

Способ применения

1. Промойте и высушите участок кожи, где будет использоваться изделие.
2. Разместите подушку клейкой частью к внутренней части обуви под переднюю часть стопы. Прижмите к обуви для надежного крепления.
3. После снятия изделия промойте теплой водой и высушите естественным путем (без использования нагревательных приборов и избегая попадания прямых солнечных лучей).
4. После высыхания изделие готово к повторному использованию.

Показания

- Разгрузка и амортизация переднего отдела стопы
- Снятие усталости и облегчение при ходьбе в обуви на каблуке

- Для уменшення ощущення усталості в передньому відділі стопи при поперечній плоскостопі

Предостереження

Не рекомендується використовувати більше 16 годин на день.

Тільки для зовнішнього місцевого використання.

Не допускати контакту з відкритими ранами.

Людам з діабетом та проблемами кровообігу, перед використанням виробу слід проконсультуватися з лікарем.

Зберігати у недоступному для дітей місці.