

Описание

Тонкая прозрачная гелевая подушка на клеевой основе, обеспечивающая обезболивающее и амортизирующее действие в области пяты, предотвращая образование мозолей.

Состав

Полимерный гель с медицинскими маслами

2шт. в упаковке.

Размер универсальный

Способ применения

1. Промойте и высушите участок кожи, где будет использоваться изделие.
2. Разместите накладку клейкой частью к внутренней части обуви, под верхнюю часть пятки. Прижмите к обуви для надежного крепления
3. Протирайте изделие теплой водой при необходимости.

Показания

- Обеспечивает защиту уязвимым участкам, предотвращая трение и раздражение кожи
- Обеспечивает дополнительный комфорт во время ходьбы в новой обуви.
- Для увлажнения и заживления мозолей и ссадин

Предостережение

Не рекомендуется использовать более 16 часов в день.

Только для наружного местного использования.

Не допускать контакта с открытыми ранами.

Людам с диабетом и проблемами кровообращения перед использованием изделия следует проконсультироваться с врачом.

Хранить в недоступном для детей месте.