

## Склад

Гель складається з суміші полісилоксанів, до складу якої входять:

- Диметикон (INCI, CAS 63148-62-9) - 30000 сСт
- Диметикон (INCI, CAS 63148-62-9), диметиконовий кросполімер (INCI, CAS 213629-14-2)
- Триметилсилоксисилікат (INCI, 68988-56-7), ксилол (INCI, 1330-20-7)
- Диметикон (INCI, CAS 63148-62-9) - 100 сСт

## Опис

**Медичний виріб BLIZAN (БЛІЗАН) силіконовий гель** випускається у формі гелю в кількості 15g (г) і у формі гелю в кількості 50g (г) у тубі та у формі гелю у кількості 15ml (мл) у флаконі з аплікатором roll-on, у картонній упаковці з інструкцією для застосування для пацієнта.

Медичний виріб Силіконовий гель для рубців BLIZAN (БЛІЗАН) складається із суміші полісилоксанів (силікону) з різними фізичними властивостями. Це — безбарвний, опалесцентний гель без запаху.

Медичний виріб - гель BLIZAN (БЛІЗАН), силіконовий гель - це гіпоалергенний, прозорий, швидко висихаючий виріб, призначений для рубців різного походження: післяопераційних, опікових, посттравматичних, а також розтяжок.

Силіконовий гель створює тонкий, водонепроникний шар на поверхні шкіри зменшуючи свербіж та відчуття напруги.

## Спосіб застосування

Гель слід наносити зовнішньо на шкіру. У випадку будь-яких побічних ефектів слід припинити застосування.

## Упаковка


**Медичний виріб** – BLIZAN (БЛІЗАН) силіконовий гель – упакований по 15g (г) або по 50g (г) у пластикові туби з канюлею, закритою кришкою. Силіконовий гель BLIZAN (БЛІЗАН) упакований по 15g (г) у пластикові флакони з аплікатором roll-on.

Зовнішня упаковка - це картонна коробка з інструкцією для застосування.

На тубі або флаконі розміщується наступна інформація про виріб:

Найменування, склад, спосіб використання, ідентифікація виробника та

дистриб'ютора, позначення , графічні символи, що позначають умови

зберігання , та

необхідність ознайомлення з інструкцією для застосування .

На кожній тубі, упаковці та на кожному флаконі маркується партія та термін придатності у наступному форматі:

ZZZ

MM RRRR

де:

ZZZ означає номер серії, починаючи від 001, 002 і т.д.

MM RRRR означає термін придатності, де MM означає місяць, а RRRR – рік

Для туб: номер партії знаходиться спереду на спаяній частині туби, а термін придатності – ззаду.

### **Виробник**

ТОВ Арісто Фарма (Aristo Pharma Sp. z o.o.) вул. Балетова 30, 02876 Варшава  
ПОЛЬЩА Aristo Pharma Sp. z o.o., address Baletowa 30, 02-867 Warsaw Poland

**Уповноважений представник в Україні:** Представництво «Еспарма ГмбХ»  
(Німеччина) Юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців 21/27,  
оф.405