

## **Состав**

соль морская, вода очищенная.

## **Описание**

Медицинское изделие содержит морскую изотоническую воду в физиологической концентрации 9 г/л (g/l) NaCl. Деликатно очищает и промывает носовые полости, улучшает дыхание, способствует увлажнению и очищению слизистой носа. Концентрация соли оптимизирована для предотвращения любого раздражения носа.

## **Рекомендации по применению**

- для ежедневной гигиены полости носа;
- для облегчения симптомов сухости и раздражения слизистой носа, в том числе при сухости слизистой носа, обусловленной нахождением в помещениях с искусственным кондиционированием воздуха и/или центральным отоплением;
- с целью сохранения физиологических характеристик слизистой носа в изменившихся микроклиматических условиях, у курильщиков, при работе в запыленных помещениях и в сложных климатических условиях;
- как средство, способствующее удалению назального секрета и облегчению дыхания;
- как дополнительное средство при инфекционных и аллергических заболеваниях полости носа, придаточных пазух и носоглотки; для подготовки полости носа к нанесению лекарственных средств;
- по уходу за носовой полостью после хирургических вмешательств.

**В виде спрея изотонический раствор применяют у детей с 3 лет и взрослых.**

## **Предостережение**

Использование спрея противопоказано детям до 3-х лет из-за возможного механическое раздражение слизистой носа. Не применять при повышенной чувствительность к компонентам средства.

Перед применением после операции или травмы носа следует проконсультироваться с лечащим врачом. Перед использованием младенцам, малышам (до 3 лет) и беременным женщинам следует проконсультироваться с врачом.

## **Способ применения**

Перед использованием медицинского изделия внимательно прочтите инструкцию по применению. Сохраните эту инструкцию по применению на случай, если вам потребуется обратиться к ней снова.

**Спрей.** Спрей применяют интраназально (в носовые походки) взрослым и детям с 3-х лет. Детям до 11 лет следует применять под наблюдением взрослых. Пожилые люди или люди с ограниченными возможностями при использовании спрея могут нуждаться в посторонней помощи. Перед использованием взболтать и снять защитный колпачок спрея. Перед первым использованием нажмите на насос-дозатор до равномерного распыления. Держите флакон вертикально и вставьте наконечник назального распылителя в нос. Распыляйте во время дыхания и осторожно вдыхайте нос. Взрослым рекомендовано по 2 орошения; детям в возрасте от 3-х лет - по 1-2 орошения в каждый носовой ход 3-4 раза в сутки с лечебной целью, с гигиенической целью - 1-4 раза в сутки. Дайте средству действовать несколько секунд. Остаток вытекающей жидкости устраниТЬ. После каждого использования снова наденьте защитный колпачок.

Рекомендуется индивидуальное использование флакона.

Благодаря химическому составу и концентрации длительность и кратность использования изделия не ограничены, продукт безопасен при длительном применении, не вызывает привыкания.

## **Срок годности**

2 года.

## **Условия хранения**

Хранить в недоступном для детей месте в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C.

## **Упаковка**

По 50, 100 мл (мл) во флаконе с пробкой-капельницей. По 1 флакону в пачке.

**Производитель**

ЧАО Фармацевтическая фабрика «Виола», 69063, Украина, г. Запорожье, ул. Академика Амосова, 75.