

Состав

соль морская, вода очищенная.

Описание

Медицинское изделие содержит морскую изотоническую воду в физиологической концентрации 9 г/л (g/l) NaCl. Деликатно очищает и промывает носовые полости, улучшает дыхание, способствует увлажнению и очищению слизистой носа. Концентрация соли оптимизирована для предотвращения любого раздражения носа.

Рекомендации по применению

- для ежедневной гигиены полости носа;
- для облегчения симптомов сухости и раздражения слизистой носа, в том числе при сухости слизистой носа, обусловленной нахождением в помещениях с искусственным кондиционированием воздуха и/или центральным отоплением;
- с целью сохранения физиологических характеристик слизистой носа в изменившихся микроклиматических условиях, у курильщиков, при работе в запыленных помещениях и в сложных климатических условиях;
- как средство, способствующее удалению назального секрета и облегчению дыхания;
- как дополнительное средство при инфекционных и аллергических заболеваниях полости носа, придаточных пазух и носоглотки; для подготовки полости носа к нанесению лекарственных средств;
- по уходу за носовой полостью после хирургических вмешательств.

В виде капель изотонический раствор применяют у детей от 2-х недель и взрослых.

Предупреждение

Не применять при повышенной чувствительности к компонентам средства. Перед применением после операции или травмы носа следует проконсультироваться с лечащим врачом.

Способ применения

Перед использованием медицинского изделия внимательно прочтите инструкцию по применению. Сохраните эту инструкцию по применению на случай, если вам потребуется обратиться к ней снова.

Капли. Взрослым назначают – по 2 капли; детям в возрасте от 1 года – по 1-2 капли; детям до 1 года – по 1 капле в каждый носовой ход 3-4 раза в сутки в лечебных целях, с гигиенической целью – 1-4 раза в сутки.

Благодаря химическому составу и концентрации длительность и кратность использования изделия не ограничены, продукт безопасен при длительном применении, не вызывает привыкания.

Срок годности

2 года

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Упаковка

По 30 мл (мл) во флаконе с пробкой-капельницей. По 1 флакону в пачке.

Производитель

ЧАО Фармацевтическая фабрика «Виола», 69063, Украина, г. Запорожье, ул. Академика Амосова, 75