

## **Состав**

ТИАВ (микрочастицы титана диоксида с ковалентно связанными ионами серебра); натрия гиалуронат, экстракт алоэ барбаденского; каприловый/каприновый триглицерид; стеарат ПЭГ-6 (и) гликоля стеарат (и) стеарат ПЭГ-32, глицерил стеарат.

## **Описание**

Медицинское изделие ВагиТиаб выпускается в форме быстрорастворимых мягких желатиновых капсул, содержащих несколько компонентов, благодаря свойствам веществ которых ВагиТиаб создает эффект защитного барьера в качестве вспомогательного медицинского изделия при лечении бактериальных и вирусных инфекций, таких как вульвовагинит, генитальный герпес и кондиломы, а также послеродовых повреждений.

ВагиТиаб образует защитный барьер в зоне поражения с целью изоляции и защиты тканей от внешних раздражителей и способствует процессу нормального физиологического рубцевания и процесса заживления.

ВагиТиаб обеспечивает двойное действие:

- изолирует область применения от внешних агрессивных воздействий микробов;
- ограничивает микробную колонизацию в области применения, создавая идеальные условия для восстановления естественных физиологических функций тканей.

## **Показания**

Вспомогательное медицинское изделие ВагиТиаб применяют во время:

- лечения бактериальных, грибковых и вирусных инфекций, таких как кандидоз и кондиломы;
- лечении послеродовых повреждений;
- в профилактике рецидивов генитального герпеса 2 (ВПГ-2).

Медицинское изделие ВагиТиаб не является ни спермицидом, ни контрацептивом.

### **Способ применения**

1. перед применением тщательно очистить область половых органов.
2. ввести капсулу ВагиТиаб глубоко во влагалище.
3. повторять применение один раз в день в течение семи дней.

Медицинское изделие ВагиТиаб следует применять при появлении первых симптомов (зуд, жжение, неприятные ощущения и т.д.). После местной терапии период приостановления применения изделия не требуется.

### **Предостережение**

- Применять медицинское изделие только при неповрежденной эпителиальной ткани.
- Не применять изделие для целей, кроме тех, что указаны в инструкции к применению.
- Перед применением тщательно вымыть руки.
- Не применять изделие после окончания срока годности, указанного на упаковке.
- Хранить при комнатной температуре и держать подальше от источников тепла.
- Не замораживать.
- Держать в недоступном для детей месте.
- Только для местного применения - не глотать.
- Не применять, если упаковка открыта или повреждена.

- Не применять в случае известной чувствительности к любому из компонентов.
- Прекратить лечение в случае аномальных кожных реакций.
- В случае длительного применения проконсультироваться с врачом.
- Изделие не является ни спермицидом, ни контрацептивом.

### **Противопоказания**

Случаев передозировки не наблюдалось. Повышенная чувствительность к любому из компонентов. Взаимодействие с лекарственными средствами и веществами не наблюдалось.

### **Условия хранения**

Хранить при температуре 9-25 °С в недоступном для детей месте. Держать подальше от источников повышенной влаги и тепла. Под воздействием прямых солнечных лучей изделие может приобрести легкий желтоватый цвет, что не влияет на его функциональные особенности и срок годности.

### **Упаковка**

по 10 капсул в блистере, по 1 блистеру в картонной коробке.

### **Производитель**

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ЭнТиСи С.р.л., Виа Луиджи Рацца, 3, 20124 Милан (МИ), Италия (NTC S.r.l., Via Luigi Razza, 3, 20124 Milano (MI), Italy).

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В УКРАИНЕ:

ООО Конарк Интелмед, ул. Шевченко, 315, г. Харьков, 61033, Украина,  
тел. +38 057 714-38-01, +38 057 714-38 02.

Уполномоченный представитель в Украине осуществляет функции по  
принятию претензий от потребителей.